



---

ATMOS S 351 OT

**L'aspirateur  
chirurgical  
silencieux et  
intelligent pour  
toutes les exigences**

---

*Together  
ahead.  
Since 1888.*

---

# S 351 OT

## Aspirateur chirurgical de pointe guidé par microprocesseur Performant, petit, fiable !

C'est notamment lors d'interventions critiques que les exigences de concentration de l'équipe de bloc et de la fiabilité des produits sont les plus élevées – une utilisation fiable et un faible niveau sonore soutiennent l'équipe et lui permettent de se concentrer sur l'essentiel.



Extrême-  
ment  
silencieux

### GRÂCE À LA FONCTION START-STOP

L'ATMOS S 351 OT détecte en mode AUTO automatiquement le besoin d'aspiration. Dès que du liquide se trouve dans le champ opératoire, l'ATMOS S 351 OT démarre automatiquement la mise en place de la dépression réglée et l'aspiration se fait sans délai. Lorsque la dépression cible réglée est atteinte, l'appareil maintient cette dépression de manière constante et la pompe s'arrête, le système est donc silencieux.

Plus de  
sécurité

### GRÂCE À UN CONFORT MAXIMAL D'UTILISATION

Des unités de dépression pré-réglables (mbar, mmHg ou kPa), le réglage précis de la dépression cible souhaitée, une puissance d'aspiration rapide et constante même pour des taux de dépression faible, un display en couleurs ainsi que des alarmes acoustiques et visuels assurent la facilité d'utilisation même en situations stressantes.

Très grande  
flexibilité

### GRÂCE À DE NOMBREUX ACCESSOIRES

L'ATMOS S 351 OT peut être équipé de différents systèmes de recueil des sécrétions (réutilisables ou à usage unique) et d'un bocal de sécurité flexible. Pour une utilisation mobile, l'aspirateur chirurgical peut être fixé sur un chariot. La pédale de régulation permet de régler intuitivement la dépression au pied.

Protection  
hygiénique  
parfaite

### GRÂCE AU CONCEPT D'HYGIÈNE

La surface de l'ATMOS S 351 OT peut être facilement et rapidement nettoyée grâce aux commandes tactiles. Le système moderne de recueil des sécrétions et le filtre hydrophobe antibactérien et antiviral protègent le personnel et le patient contre les infections.

## Domaines d'utilisation



Neurochirurgie



Chirurgie cardiaque



Gastroentérologie



Chirurgie maxillo-faciale



Ophtalmologie



Chirurgie générale



Puissance d'aspiration	36 ± 2 l /min
Dépression maximale	-900 mbar (-90 kPa, -675 mmHg)
Plage de réglage de la dépression	0 à -900 mbar Réglables par paliers de 10, 20 ou 50 mbar
Niveau sonore	<54 dB(A)
Dimensions (HxBxT)	300 x 330 x 200 mm (sans trolley et sans bocal à sécrétions) 880 x 455 x 405 mm (avec trolley et sans bocal à sécrétions)
Poids	10,2 kg (sans trolley et sans bocal à sécrétions) 24,7 kg (avec trolley et sans bocal à sécrétions)
Tension	230 V, 50/60 Hz
Bocal à sécrétions	Bocal réutilisable (1,5 l, 2,5 l) Systèmes à usage unique (ATMOS, Serres®, Medi-Vac®, Receptal®)
Réglages dans le menu utilisateur	Langue, unité de dépression, paliers de dépression, intermit, luminosité du display, date, heure
Intermit	Dépression finale : -100 à -900 mbar Durée de mise en place de la dépression : 15 sec à 300 sec Durée de baisse de la dépression : 15 sec à 300 sec Temps de maintien de la dépression : 5 sec à 995 sec Pause : 5 sec à 995 sec

#### Référence :

444.0460.0	ATMOS S 351 OT - Set de base, 230 V
444.0462.0	ATMOS S 351 OT (bocal 1,5 l), 230 V
444.0470.0	ATMOS S 351 OT mobile, 230 V
444.0476.0	ATMOS S 351 OT mobile (bocaux 2 x 3 l), 230 V
444.0496.0	ATMOS S 351 OT - Set de base, 230 V (Médi-Vac®)
444.0497.0	ATMOS S 351 OT - Set de Base, 230 V (Serres®)



#### ATMOS Onlineshop

Vous trouverez plus d'informations concernant nos produits et leur gamme d'accessoires dans notre Webshop.

[atmosmed.shop](https://atmosmed.shop)



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Votre contact sur le terrain :

Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch / Allemagne

Tel +49 (0)7653-689-0  
Fax +49 (0)7653-689-190  
E-mail [info@atmosmed.fr](mailto:info@atmosmed.fr)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)