

ATMOS C 341 Battery / ATMOS E 341 Battery

Notfallabsaugung Schnell, Sicher und Einfach



KLINIK
ARZTPRAXIS
NOTAUFNAHME
PFLEGEHEIM



Wenn jede Sekunde zählt....

Die ATMOS Notfallabsauggeräte werden in Krankenhäusern, niedergelassenen Praxen und Pflegeheimen in Notfällen eingesetzt, bei denen akute Lebensgefahr aufgrund blockierter Luftwege besteht. Die mobilen Geräte werden zur Absaugung der Mundhöhle, des Nasen-Rachen-Raumes und des Bronchialsystems eingesetzt.

Stabil, platzsparend, absolut zuverlässig und unabhängig vom Einsatzort: die ATMOS Notfallabsauggeräte leisten in jeder Situation einen wichtigen Beitrag zur optimalen Patientenversorgung.

SCHNELL - Im Aufbau des Zielvakuums

SICHER - Durch intuitive Bedienung

EINFACH - In Bedienung und Reinigung



ATMOS E 341 Battery Notfallabsaugung in der Klinik




Optimal bedienbar

Hohe Saugleistung

Einfache Adaption an Notfallwagen

Das optimale Gerät, sobald Zeit und Saugleistung von höchster Bedeutung sind. Durch die elektronisch voreingestellten Vakuumwerte und der hohen Saugleistung ist eine schnelle und sichere Absaugung garantiert. Keine komplizierten Einstellungen – keine Unsicherheit. Das Gerät ist einfach zu bedienen.

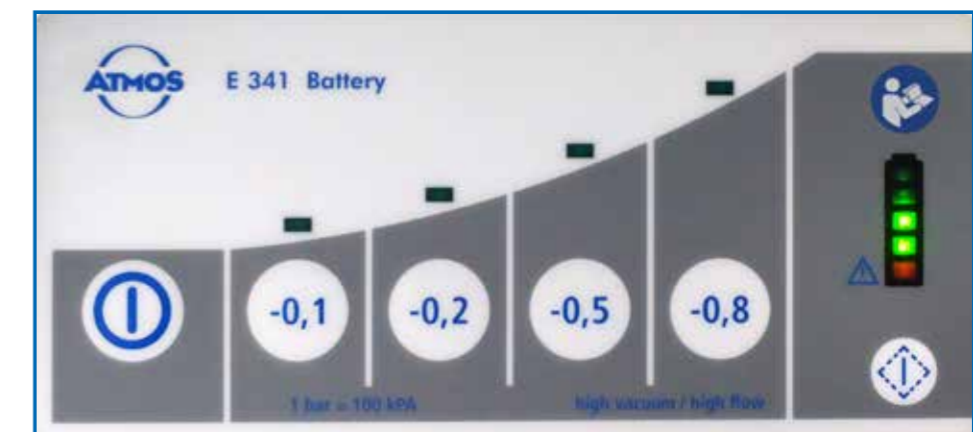

In allen Patientengruppen von Neugeborenen bis zu Hochbetagten, von ambulanten, leicht Erkrankten bis hin zu Schwerverletzten kann es plötzlich zu Notfällen kommen.

Das Notfallabsauggerät ATMOS E 341 Battery zählt neben der Notfallbeatmung, dem Defibrillator und dem mobilen Monitoring zur lebensrettenden Notfallausrüstung - ein Muss auf jeder Station.

Zu den Einsatzbereichen in der Klinik gehören alle Stationen:

- Notaufnahme
- Intensivstation
- Aufwachraum
- Normalstation

Des Weiteren können Absauggeräte bei einem innerklinischen Transport verwendet werden.



ATMOS E 341 Battery Die leistungsstarke „E-Klasse“ auf einen Blick



ATMOS C 341 Battery Absaugung zu Hause und im Pflegeheim



Einsatzgebiete

- Sekretabsaugung bei blockierten Luftwegen
- Absaugung von Nahrungsbestandteilen
- Sekretabsaugung nach Laryngektomie
- Sekretabsaugung nach Tracheotomie
- Sekretabsaugung bei Erkrankungen mit vermehrter Speichelproduktion
- Absaugung bei einer Schädigung der Atemwege nach Tumorbestrahlung
- Sekretabsaugung bei Schluckstörungen nach einem Schlaganfall
- Geriatrische Mundhygiene

Optimale Bedienung

Individuelle Vakuumeinstellung

Jeder Zeit einsatzbereit

Das optimale Gerät, sobald Saugleistung und präzise Einstellung von höchster Bedeutung sind. Dank der stufenlosen Vakuumeinstellung kann die Saugleistung individuell auf den Patienten abgestimmt werden.

Die stufenlose Vakuumeinstellung ermöglicht eine exakte und auf die Situation abgestimmte Saugleistung. Es können Werte zwischen -0,05 bar und -0,8 bar eingestellt werden.

Für den Einsatz bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen.



ATMOS C 341 Battery Die „C-Klasse“ auf einen Blick



Die Behältersysteme

Mehrwegbehältersystem (DDS)

Sichere Sekretaufnahme:

- Autoklavierbarer DDS-Behälter
- Überlaufschutz mit Schwimmerkugel und Bakterienfilter
- Keine Verschlauchung nötig – „Plug & Play“-Einsatz
- Hydrophober Bakterienfilter im Behälter integriert
- Behälter sind einfach zu montieren & demontieren
- Gut zu reinigende Konturen und Flächen

Ihre Vorteile:

- Einfaches Handling
- Fehler in der Verschlauchung sind zu 100% ausgeschlossen
- Einfache, schnelle und gründliche Wiederaufbereitung
- Zeitersparnis bei der Geräteinbetriebnahme



Einwegsystem Serres®

Die ATMOS Notfallabsauggeräte können mit dem Serres® -Einwegsystem verwendet werden.



Einwegsystem Medi-Vac®

Die ATMOS Notfallabsauggeräte können mit dem Medi-Vac® -Einwegsystem verwendet werden.

Technische Daten

ATMOS E 341 Battery

ATMOS C 341 Battery



Saugleistung	34 l/min (± 4 l/min)	26 l/min (± 4 l/min)
Akku	Lithium-Ionen-Akku	Bleiakku
Laufzeit Akku	60 min	45 min
Ladezeit	ca. 4 h	> 6 h
Akkukapazitätsanzeige	5 LEDs	4 LEDs
Ladekontrolle	▪	▪
Vakuumeinstellung	4 Stufen -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar, -0,8 bar	individuell einstellbar -0,05 bar bis -0,8 bar
Vakuummeter	-	▪
Vakuumanzeige	▪	▪
Gewicht	3,65 kg (ohne Behälter)	4,6 kg (ohne Behälter)
Größe	370 x 277 x 146 mm	370 x 277 x 146 mm
Lautstärke	< 60 dB (A)	< 60 dB (A)
Sekretbehältergröße	1000 ml	1000 ml
Mehrwegbehälter	▪	▪
Einwegbehälter Serres®	▪	▪
Einwegbehälter Medi-Vac®	▪	▪
Spannungsversorgung	230 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50/60 Hz
Betriebstemperatur	-5° bis +50°	-5° bis +50°
Wand- und Gerätehalterung	▪	▪

- vorhanden
- nicht vorhanden

Notfallabsauggeräte

ATMOS C 341 Battery		REF
ATMOS C 341 Battery / DDS		318.1300.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für DDS-Behältersystem, DDS-Sekretbehälter 1 l, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Mehrweg-Absaugschlauch ø 10 mm, L = 1,3 m, 10 DDS-Bakterienfilter, 10 Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch ø 10 mm, Gebrauchsanweisung		HM-Nr. 01.24.02.1022 PZN 11549367
ATMOS C 341 Battery / Serres®		318.1400.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung <u>Bitte beachten:</u> Serres®-Absaugbeutel 1 l und Saugschläuche (REF 006.0057.0) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.		PZN 11549396
ATMOS C 341 Battery / Medi-Vac®		318.1600.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für Medi-Vac®-Behältersystem, Medi-Vac®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung <u>Bitte beachten:</u> Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l und Saugschläuche (REF 006.0057.0) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.		
ATMOS E 341 Battery		REF
ATMOS E 341 Battery / DDS		319.1000.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für DDS-Behältersystem, DDS-Sekretbehälter 1 l, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Mehrweg-Absaugschlauch ø 10 mm, L = 1,3 m, 10 DDS-Bakterienfilter, 10 Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch ø 10 mm, Gebrauchsanweisung		HM-Nr. 01.24.02.1023 PZN 11549373
ATMOS E 341 Battery / Serres®		319.1100.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für Serres®-Behältersystem, Serres®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung <u>Bitte beachten:</u> Serres®-Absaugbeutel 1 l und Saugschläuche (REF 006.0057.0) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.		PZN 11549404
ATMOS E 341 Battery / Medi-Vac®		319.1200.0
Lieferumfang: Grundgerät, Gerätefuß, Schlauchaufwicklung, Halterung für Medi-Vac®-Behältersystem, Medi-Vac®-Außenbehälter 1 l, Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem, Netz- und Ladegerät, 2-poliges Netzanschlusskabel, Gebrauchsanweisung <u>Bitte beachten:</u> Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l und Saugschläuche (REF 006.0057.0) sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.		



REF 318.1300.0



REF 318.1400.0



REF 319.1000.0



REF 319.1100.0



REF 318.1600.0



REF 319.1200.0

Zubehör

Artikel	REF
1 DDS-Behältersystem 1 l, komplett Lieferumfang: DDS-Sekretbehälter 1 l, DDS-Behälterdeckel innen, DDS-Behälterdeckel außen, Filterhalter, Dichtungsring, Schwimmerkugel, 10 DDS-Bakterienfilter	318.1000.0 PZN 11549410
2 Serres®-Außenbehälter 1 l	312.0465.0
3 Medi-Vac® Aufnahmebehälter 1 l	312.0473.0
4 Wand- und Gerätehalterung für ATMOS Notfallsauger Einfache Entnahme der ATMOS Notfallsauger aus der Halterung dank Einhand-Entriegelung per Tastendruck. Zur direkten Montage der ATMOS Notfallsauger an einer Wand bzw. an einer Normschiene. Das Ladezubehör der ATMOS Notfallsauger kann an der Wand- und Gerätehalterung einfach angebracht werden, sodass die Geräte automatisch geladen werden können. Lieferumfang: Wand- und Gerätehalterung	318.1250.0 PZN 11544927
5 Umrüstset DDS-Behältersystem Zum einfachen Austausch des Einmal-Behältersystems (Serres®/ Medi-Vac®) auf das DDS-Behältersystem. Der Wechsel des Behältersystems erfolgt ohne Werkzeug. Lieferumfang: DDS-Behältersystem 1 l, komplett, Halterung für DDS-Behältersystem, Mehrweg-Absaugschlauch, Ø 10 mm	318.1350.0 PZN 11549433
6 Umrüstset Serres®-Behältersystem Zum einfachen Austausch des DDS-Behältersystems bzw. Einmal-Behältersystem Medi-Vac® auf das Einmal-Behältersystem Serres®. Der Wechsel des Behältersystems erfolgt ohne Werkzeug. Lieferumfang: Serres®-Außenbehälter 1 l, Halterung für Serres®-Behältersystem, Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem	318.1450.0 PZN 11549456
7 Umrüstset Medi-Vac®-Behältersystem Zum einfachen Austausch des DDS-Behältersystems bzw. Einmal-Behältersystem Serres® auf das Einmal-Behältersystem Medi-Vac®. Der Wechsel des Behältersystems erfolgt ohne Werkzeug. Lieferumfang: Medi-Vac®-Außenbehälter 1 l, Halterung für Medi-Vac®-Behältersystem, Vakuumschlauch für Einmal-Absaugsystem	318.1650.0
8 Kfz-Kabel für ATMOS Notfallsauger, Anschluß 12V~	318.0036.0
9 Trageriemen für ATMOS Geräte	312.0850.0



1 REF 318.1000.0



2 REF 312.0465.0



3 REF 312.0473.0



4 REF 318.1250.0



5 REF 318.1350.0



6 REF 318.1450.0



7 REF 318.1650.0



8 REF 318.0036.0



9 REF 312.0850.0

Verbrauchsmaterial

Artikel	REF
1 Mehrweg-Absaugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 1,30 m, 1 St. Einzel verpackt, Temperaturbeständig bis 200°C	318.1012.0 PZN 11549462
2 Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch, Ø 10 mm, 10 St. Zur einmaligen Verwendung mit Mehrweg-Absaugschläuchen 10 mm in Verbindung mit dem DDS-Behältersystem. Nicht autoklavierbar.	318.1100.0
3 Bakterienfilter für ATMOS DDS-Sekretbehälter, Packung á 10 St. Verbrauchsmaterial, nicht autoklavierbar. Wechsel mindestens alle 2 Wochen empfohlen. Bei starker Verschmutzung oder Patientenwechsel ist der Filter sofort zu wechseln.	340.0054.0
4 Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 10 St. Mit integriertem Gerätekonnektor und Fingertip, nicht autoklavierbar. Absaugschlauch für Absauggeräte mit konischem Anschluss (Durchmesser des Geräteanschluss 7,5 - 10 mm), Wechsel: 1 x pro Patient.	006.0057.0
5 Saugschlauch, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 St. Mit integriertem Gerätekonnektor und Fingertip, nicht autoklavierbar. Absaugschlauch für Absauggeräte mit konischem Anschluss (Durchmesser des Geräteanschluss 7,5 - 10 mm), Wechsel: 1 x pro Patient.	006.0059.0
6 Serres®-Absaugbeutel 1 l, nicht autoklavierbar, 36 St. Mit integriertem Bakterienfilter und Winkelanschluss, Wechsel: 1x pro Patient	312.0466.0
7 Medi-Vac®-Absaugbeutel 1 l, nicht autoklavierbar, 50 St. Wechsel: 1x pro Patient	312.0474.0
8 Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem Verbindungsschlauch zwischen dem ATMOS Notfallsauger und dem Einmal-Behältersystem mit Anschlusswinkel. Nicht autoklavierbar	318.1211.0
9 Absaugkatheter Unomedical®, Größe: CH 12, L = 50 cm, 100 St. Ø 4 mm weiß gerade, Zentralöffnung, 2 kleine seitliche Öffnungen, Sauganschluss Ø 6 mm, steril, nicht autoklavierbar	000.0294.0
10 Absaugkatheter Unomedical®, Größe: CH 14, L = 50 cm, 100 St. Ø 4,7 mm grün gerade, Zentralöffnung, 2 kleine seitliche Öffnungen, Sauganschluss Ø 6 mm, steril, nicht autoklavierbar	000.0295.0
11 Absaugkatheter Unomedical®, Größe: CH 16, L = 50 cm, 100 St. Ø 5,3 mm orange gerade, Zentralöffnung, 2 kleine seitliche Öffnungen, Sauganschluss Ø 6 mm, steril, nicht autoklavierbar	000.0296.0



1 REF 318.1012.0



2 REF 318.1100.0



3 REF 340.0054.0



4 REF 006.0057.0



5 REF 006.0059.0



6 REF 312.0466.0




7 REF 312.0474.0



8 REF 318.1211.0



9 REF 000.0294.0

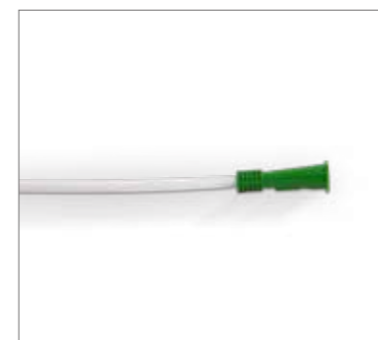

10 REF 000.0295.0



11 REF 000.0296.0

Ersatzteile DDS-Behältersystem

Artikel	REF
1 DDS-Sekretbehälter 1 l Lieferumfang: DDS-Sekretbehälter 1 l	318.1013.0
2 DDS-Behälterdeckel komplett Lieferumfang: DDS-Behälterdeckel außen, DDS-Behälterdeckel innen, Filterhalter, Dichtungsring, Schwimmerkugel, 10 DDS-Bakterienfilter	318.1016.0
3 DDS-Behälterdeckel außen Lieferumfang: DDS-Behälterdeckel außen	318.1002.0
4 DDS-Behälterdeckel innen Lieferumfang: DDS-Behälterdeckel innen	318.1004.0
5 Schwimmerkugel für DDS-Behältersystem Lieferumfang: Schwimmerkugel	000.0839.0
6 Filterhalter für DDS-Behältersystem Lieferumfang: Filterhalter	318.1003.0
7 Dichtungsring für DDS-Behältersystem Lieferumfang: Dichtungsring	055.0112.0



1 REF 318.1013.0



2 REF 318.1016.0



3 REF 318.1002.0




4 REF 318.1004.0



5 REF 000.0839.0



6 REF 318.1003.0

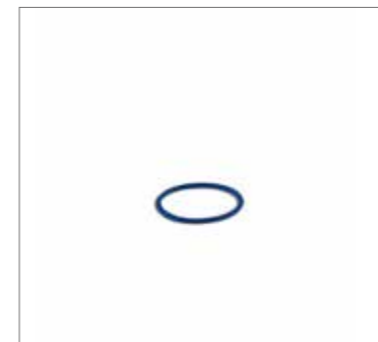

7 REF 055.0112.0

Ersatzteile Gerät

Artikel	REF
1 Akku für ATMOS C 341 Battery Typ: Blei; Abmessung (B x H x T): 67 x 134 x 67 mm; Gewicht: 1,15 kg; Nennkapazität: 3,4 Ah; Nennspannung: 12 V nominal; Laufzeit: 45 min; Ladezeit: 14 h; Lebensdauer: 400 Ladezyklen in ca. 3 Jahren Lieferumfang: Blei-Akku	318.0001.0
2 Akku für ATMOS E 341 Battery Typ: Lithium-Ionen; Abmessung (B x H x T): 43 x 73 x 75 mm; Gewicht: 0,4 kg; Nennkapazität: mind. 4,3 Ah; Nennspannung: 14,8 V nominal; Laufzeit: 60 min; Ladezeit: 4 h; Lebensdauer: ca. 500 Ladezyklen Lieferumfang: Lithium-Ionen-Akku	319.0015.0
3 Akkufachabdeckung Lieferumfang: Akkufachabdeckung	318.0012.0
4 Halteschaum für Akkufachabdeckung ATMOS C 341 Battery Lieferumfang: Halteschaum für Akkufachabdeckung, Befestigungsmaterial	318.0018.0
5 Schlauchaufwicklung Lieferumfang: Schlauchaufwicklung	319.0004.0
6 Gerätefuß Lieferumfang: Gerätefuß	319.0003.0
7 Halterung für DDS-Behältersystem Zur einfachen Adaption am ATMOS C 341 Battery bzw. am ATMOS E 341 Battery. Lieferumfang: Halterung für DDS-Behältersystem	318.1010.0
8 Halterung für Serres®-Behältersystem Zur einfachen Adaption am ATMOS C 341 Battery bzw. am ATMOS E 341 Battery. Lieferumfang: Halterung für Serres®-Behältersystem	318.1210.0
Halterung für Medi-Vac®-Behältersystem Zur einfachen Adaption am ATMOS C 341 Battery bzw. am ATMOS E 341 Battery. Lieferumfang: Halterung für Medi-Vac®-Behältersystem	318.1500.0
9 Entriegelungstaste Lieferumfang: Entriegelungstaste	318.0013.0
10 Feder für Entriegelungstaste Lieferumfang: Feder für Entriegelungstaste	000.1029.0
11 Netz- und Ladegerät für ATMOS C/ E 341 Battery Technische Daten: Abmessung (B x H x T): 130 x 36 x 60 mm; Gewicht: 280 g Bitte beachten: 2-poliges Netzanschlusskabel muss separat bestellt werden	318.0035.0
12 2-poliges Netzanschlusskabel (L = 1,5 m) Bitte beachten: Wird mit den Ladegeräten für ATMOS Geräte (011.1334.0 und 318.0035.0) verwendet.	008.0920.0



1 REF 318.0001.0



2 REF 319.0015.0



3 REF 318.0012.0



4 REF 318.0018.0



5 REF 319.0004.0



6 REF 319.0003.0




7 REF 318.1010.0



8 REF 318.1210.0



9 REF 318.0013.0

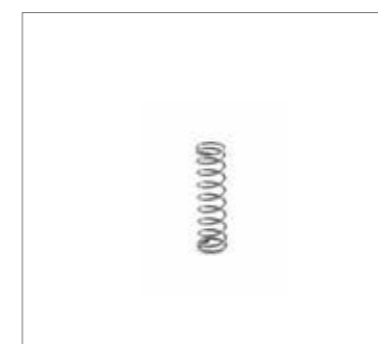

10 REF 000.1029.0



11 REF 318.0035.0



12 REF 008.0920.0



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Germany
Tel: +49 7653 689-0
atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.com