


Notice d'utilisation

ATMOS® Chair Professional

Français

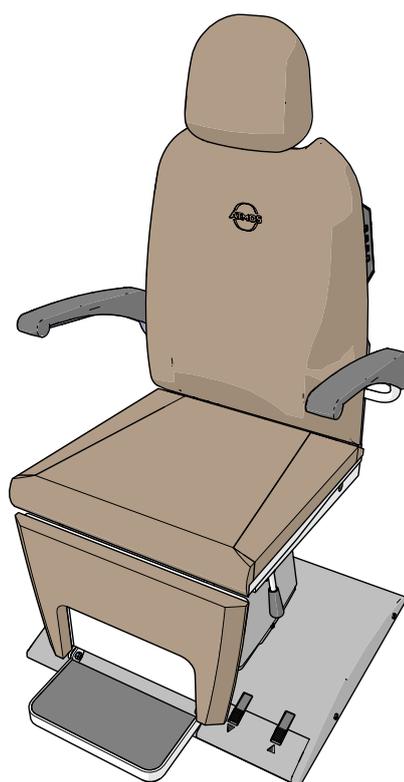

CE

GA1FR.130220.0


2018-11 Index: 01

Sommaire

1	Introduction.....	3
1.1	Conseils concernant la notice d'utilisation.....	3
1.2	Explication des pictogrammes et des symboles	4
1.3	Utilisation	5
1.4	Fonction.....	5
1.5	Utilisateurs prévus	6
1.6	Livraison	6
1.7	Transport et stockage	6
2	Conseils de sécurité.....	7
2.1	Conseils généraux de sécurité.....	7
2.2	Dangers pour l'utilisateur, le patient ou des tiers.....	7
2.3	Éviter tout dommage sur l'appareil.....	8
3	Installation et mise en service	9
3.1	Vue d'ensemble de l'appareil	9
3.2	Brancher l'appareil	10
4	Utilisation	11
4.1	Conditions environnementales durant l'utilisation.....	11
4.2	Positionner le patient	11
4.3	Régler le fauteuil patient.....	11
4.3.1	Régler les accoudoirs	11
4.3.2	Régler le repose-pied	12
4.3.3	Régler le dossier.....	12
4.3.4	Régler l'appuie-tête.....	12
4.3.5	Régler la hauteur d'assise	13
4.3.6	Tourner le fauteuil patient.....	13
4.3.7	Tourner la surface d'assise (en option)	13
4.4	Régler la position de choc	14
4.5	Déplacer le fauteuil patient (Variantes Mobile, Complete).....	14
4.6	Activer et désactiver le verrouillage des commandes	15
5	Nettoyage et désinfection	16
5.1	Nettoyage et désinfection des surfaces	16
5.2	Nettoyage et désinfection des coussins.....	16
5.3	Désinfectants conseillés.....	17
6	Maintenance et service	18
6.1	Contrôles récurrents.....	18
6.2	Contrôle de fonctionnement	18
6.3	Graisser les pièces mobiles.....	18
6.4	Renvoi de l'appareil.....	18
7	Remédier à certains problèmes	20
8	Élimination	21
9	Caractéristiques techniques.....	22
10	Conseils concernant la compatibilité électromagnétique.....	23

1 Introduction

1.1 Conseils concernant la notice d'utilisation

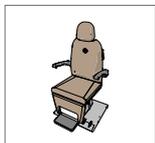

Cette notice d'utilisation contient des informations importantes vous permettant d'utiliser votre appareil en toute sécurité et de manière effective.

Cette notice ne sert pas uniquement à la formation du personnel utilisateur, mais est aussi destinée à un usage régulier consultatif. Toute reproduction, même partielle, n'est possible qu'avec une autorisation écrite d'ATMOS.

La notice d'utilisation doit toujours être à disposition près de l'appareil.



L'entretien, les contrôles récurrents, le nettoyage réguliers et une utilisation adéquate sont impératifs. Ils assurent la sécurité de fonctionnement et la disponibilité opérationnelle de l'appareil.

La maintenance, les réparations et les contrôles récurrents ne doivent être effectués que par des personnes disposant des connaissances spécifiques et qui connaissent le produit. Pour l'ensemble de ces mesures, la personne doit disposer des dispositifs de contrôle et des pièces détachées d'origine.



Avant de mettre en service l'appareil, lire le chapitre „2 Conseils de sécurité“ à la page 7. Vous éviterez ainsi toute situation dangereuse.

Le produit porte la certification CE selon la directive UE du Conseil sur les produits médicaux 93/42/CEE et répond aux exigences de l'Annexe 1 de cette directive.

Le produit correspond à toutes les exigences applicables de la directive 2011/65/EU concernant la restriction d'utilisation de certains produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques (« RoHS »).

Vous trouverez les certificats de conformité et nos conditions générales de vente sur notre site www.atmosmed.fr.

Le système de gestion de la qualité utilisé chez ATMOS est certifié selon la norme internationale EN ISO 13485.

Cette notice d'utilisation est valable pour les appareils suivants :

- ATMOS® Chair Professional basic 535.5200.0
- ATMOS® Chair Professional mobile 535.5400.0
- ATMOS® Chair Professional electrical 535.5300.0
- ATMOS® Chair Professional complete 535.5500.0

1.2 Explication des pictogrammes et des symboles

Dans la notice d'utilisation

 DANGER	Avertissement d'un danger qui pourrait vous tuer immédiatement ou vous blesser grièvement. Respecter les mesures nécessaires.
 AVERTISSEMENT	Avertissement d'un danger qui pourrait vous tuer ou vous blesser gravement. Respecter les mesures nécessaires.
 ATTENTION	Avertissement d'un danger qui pourrait vous blesser légèrement. Respecter les mesures nécessaires.
AVIS	Avertissement d'un danger qui pourrait endommager le produit ou d'autres objets. Respecter les mesures nécessaires.
	Avertissement d'un danger qui pourrait vous blesser ou tuer.
	Indication de dommages possibles qui peuvent être causés.
	Informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
1.	Tâches à exécuter. Procéder étape par étape.
»	Résultat obtenu.
	Bouger ou emboîter dans cette direction.
	Faire cliquer, vérifier le bon maintien.

Sur l'appareil et l'étiquette type

	Respecter la notice d'utilisation (bleu)
	Mise en garde, à respecter minutieusement
	Ce produit répond aux exigences des directives de l'EU.
	Fabricant
	Date de fabrication
SN	Numéro de série
REF	Référence
	Pièce d'utilisation type B

	A n'utiliser que dans des pièces intérieures
	Pas de déchet domestique
	Compensation du potentiel
	Courant alternatif
	Terre
	Charge maximale
	Ne pas transporter de patient ou de charges avec le fauteuil.(Variantes Mobile, Complete)

1.3 Utilisation

Utilisation conforme à la destination du produit

- Fauteuil de consultation pour examen et traitement du patient assis ou allongé
- Domaine hospitalier, cabinet médical, médecine du travail, dentistes (prophylaxie)
- Positionnement utile et confortable du patient durant le traitement / l'examen. Aide à l'examen pour le praticien, par son ergonomie et sa qualité.
- Utilisateurs prévus : uniquement un personnel formé à ce service, c'est-à-dire médecin, assistant, infirmière, soignant, etc.
- Installation et mise en service par un personnel technique du fournisseur ou par un spécialiste autorisé.

Utilisation NON conforme à la destination du produit

- A proximité d'appareils de chirurgie à haute fréquence ou de défibrillateurs.
- Dans un environnement soumis à un risque de gaz ou vapeurs inflammables ou explosifs (par ex. anesthésiants)
- Fauteuil de travail
- Fauteuil / Table d'opération
- Lit

1.4 Fonction

Le fauteuil ATMOS® peut être individuellement adapté au patient. La hauteur d'assise est réglable électriquement par une pédale intégrée ou séparée, et la hauteur et l'inclinaison de l'appuie-tête peuvent être modifiées manuellement. Le dossier peut être incliné manuellement ou électriquement jusqu'à la position horizontale. Le repose-jambes suit le mouvement de manière synchronisée. La partie supérieure du fauteuil tourne et les accoudoirs peuvent être relevés individuellement.

Contre toute action non souhaitée, il est possible de procéder à un verrouillage des commandes. Une assise rotative est disponible en option.


Variantes

	Basic	Mobile	Électrique	Complete
Hauteur de l'assise réglable électriquement	x	x	x	x
Dossier réglable manuellement	x	x		
Dossier réglable électriquement			x	x
Repose-jambes synchronisé	x	x	x	x
Mobilité		x		x
Assise rotative	En option	En option	En option	En option

1.5 Utilisateurs prévus

Uniquement un personnel formé à ce service, c'est-à-dire médecin, assistant, infirmière, soignant, etc.

1.6 Livraison

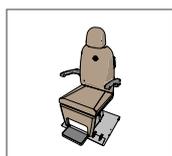

ATMOS® Chair
Professional



Notice
d'utilisation

1.7 Transport et stockage

Ne transporter l'appareil que dans un carton d'emballage rembourré et protégeant suffisamment l'appareil.

Si vous constatez des dommages dus au transport :

1. Documenter et signaler les dommages dus au transport.
2. Renvoyer l'appareil à ATMOS, voir chapitre „3. Contrôler toutes les vis de fixation pour vérifier qu'elles soient bien serrées.“ à la page 18.

Conditions environnementales pour le transport et le stockage :

- Température : -10...+50 °C
- Humidité de l'air relative : 20...95 % sans condensation
- Pression atmosphérique : 700...1060 hPa

2 Conseils de sécurité

La sécurité de l'ATMOS® Chair Professional répond aux règles de la technique et des directives de la législation des produits médicaux.

Lire et suivre les conseils de sécurité avec attention, avant d'utiliser l'appareil.

2.1 Conseils généraux de sécurité

Activer le verrouillage des commandes si vous devez laisser seul un patient, ou si les touches ou la pédale peuvent être activées involontairement. Ne laissez jamais des personnes âgées, des enfants, des personnes blessées ou handicapées ou d'autres patients nécessitant une aide seuls sur le fauteuil patient.

La validité de la conformité prend fin si le client ou un tiers procède à des modifications sur le produit. Sont compris par exemple les modifications de toutes sortes, l'utilisation d'accessoires étrangers, le retrait des étiquettes de prévention ou d'information.

Si les étiquettes manquent sur l'appareil ou ne sont plus lisibles, contactez ATMOS et faites remplacer ces étiquettes.

2.2 Dangers pour l'utilisateur, le patient ou des tiers

Choc électrique en raison d'une connexion secteur qui ne convient pas, d'une mauvaise utilisation du produit ou de pièces endommagées.

Risques de brûlures et d'arythmies cardiaques allant jusqu'à la mort.

- Avant chaque utilisation, vérifier que ni l'appareil ni le câble d'alimentation ne sont endommagés. Ne pas utiliser l'appareil si vous constatez des dommages. Dans ce cas, nettoyer l'appareil et le renvoyer en réparation.
- Si le fauteuil patient roule sur le câble secteur ou le câble secteur a subi d'autres charges : vérifier que le câble secteur n'a pas été endommagé. Ne pas utiliser le fauteuil patient si vous constatez des dommages.
- Ne pas nettoyer le fauteuil dans une station de lavage ou avec un appareil de nettoyage à haute pression.
- Débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique avant de procéder à son nettoyage ou la désinfection.
- Vous ne pouvez séparer l'appareil du secteur qu'en retirant la prise secteur du réseau électrique.
- Positionner l'appareil de manière à pouvoir à tout moment le séparer facilement du réseau d'alimentation.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise d'alimentation avec mise à la terre.
- Veiller à ce qu'aucun liquide ne pénètre l'appareil. Si du liquide a pénétré l'appareil, celui-ci ne doit plus être utilisé. Dans ce cas, nettoyer l'appareil et le renvoyer en réparation.
- N'utiliser que des accessoires et pièces détachées d'origine d'ATMOS.
- Respecter les conseils concernant les contrôles récurrents au chapitre „6.1 Contrôles récurrents“ à la page 18.
- Seules les personnes autorisées peuvent procéder aux montage, nouveaux réglages, modifications et réparations.
- Ne modifier pas l'appareil sans autorisation du fabricant.

Garder l'appareil prêt à fonctionner.

Vous ou votre patient pourriez être blessé par un défaut de fonctionnement.

- Avant chaque utilisation, contrôler l'appareil pour voir s'il n'y a pas de dommage visible. Ne pas utiliser l'appareil si vous constatez des dommages.
- Effectuer un contrôle de fonctionnement si vous avez des doutes concernant la sécurité, mais au moins une fois par semaine.
- Respecter les conseils concernant la compatibilité électromagnétique de l'appareil.
- Respecter les conseils concernant les contrôles récurrents au chapitre „6.1 Contrôles récurrents“ à la page 18.
- N'utiliser que des accessoires et pièces détachées d'origine d'ATMOS.
- Le montage, les réglages, les modifications, les ajouts et les réparations ne doivent être effectués que par des personnes autorisées par ATMOS.

Risque de renversement en cas de charge mal répartie.

Le fauteuil patient peut se renverser et vous blesser ou blesser votre patient.

- Veiller à ce que le patient est bien assis au centre de l'assise. Le patient ne doit pas être assis sur l'accoudoir, le dossier ou le repose-jambes.
- Placer le fauteuil patient en position basse et dossier relevé avant que le patient n'en descende ou ne se lève.

Risque infectieux dû à des sécrétions de patient sur l'appareil !

Des maladies peuvent être transmises.

- Nettoyer et désinfecter l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyer et désinfecter en respectant les indications d'utilisation.

Risques d'explosion et d'incendie !

Risques de brûlures et de blessures.

- Ne jamais utiliser l'appareil dans des domaines exposés à un risque d'explosion ou enrichis en oxygène.
- N'utiliser que des accessoires et pièces détachées d'origine d'ATMOS.

Seul un produit en parfait état de marche répond aux exigences de sécurité pour l'utilisateur, le patient et les tiers. Respecter pour cela les conseils suivants, concernant ce produit.

2.3 Éviter tout dommage sur l'appareil

Dommages dus à une mauvaise manipulation mobile du fauteuil patient.

Le fauteuil patient et le câble secteur pourraient être endommagés.

- Ne pas transporter de patient ou de charges avec le fauteuil.
- Ne pas faire rouler le fauteuil patient sur le câble secteur.

Dommages dus à une charge trop importante.

Le repose-pied pourrait être endommagé.

- Ne pas laisser le patient debout de tout son poids sur le repose-pied.


3 Installation et mise en service

3.1 Vue d'ensemble de l'appareil


Vue avant




Basic

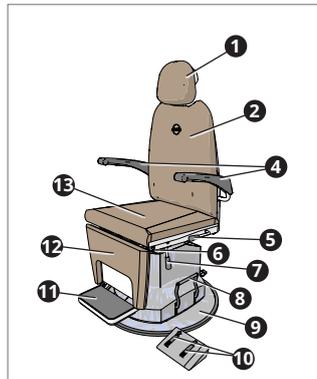

Mobile

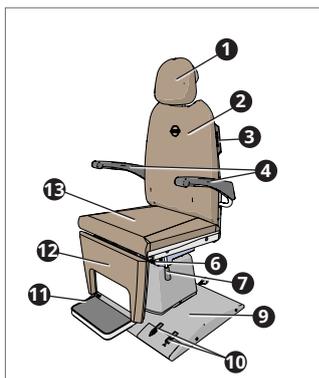


Électrique

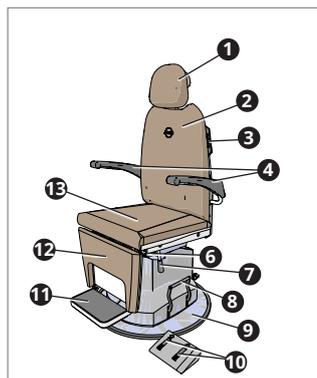

Complete


- ❶ Appuie-tête
- ❷ Dossier
- ❸ Commandes (Variantes Électrique, Complete)
- ❹ Accoudoir
- ❺ Levier de déverrouillage pour dossier (Variantes Basic, Mobile)
- ❻ Connexion Égalisation du potentiel
- ❼ Levier de déverrouillage pour la partie supérieure du fauteuil
- ❽ Levier à pédale pour roulettes (Variantes Mobile, Complete)
- ❾ Pied du fauteuil
- ❿ Pédale
- ⓫ Repose-pied
- ⓬ Repose-jambes
- ⓭ Surface d'assise

Vue arrière

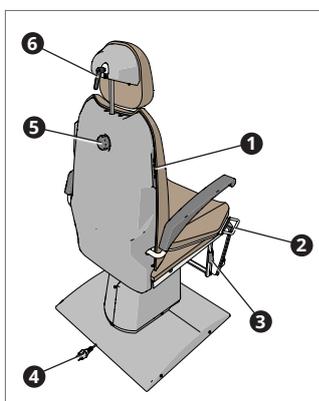

- ❶ Commandes (Variantes Électrique, Complete)
- ❷ Poignée pour assise rotative (en option)
- ❸ Levier de déverrouillage pour la partie supérieure du fauteuil
- ❹ Câble d'alimentation
- ❺ Vis de blocage pour appuie-tête (hauteur)
- ❻ Vis de blocage pour appuie-tête (inclinaison)

Commandes (Variantes Électrique, Complete)

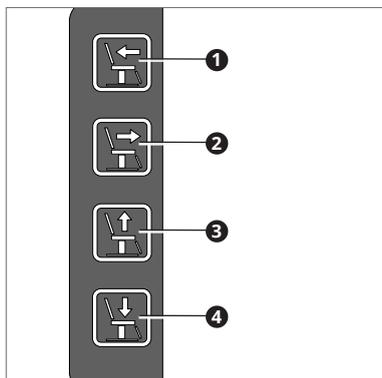

- ❶ Touche DOSSIER VERS L'ARRIÈRE
- ❷ Touche DOSSIER VERS L'AVANT
- ❸ Touche LEVER LE FAUTEUIL
- ❹ Touche BAISSER LE FAUTEUIL

3.2 Brancher l'appareil

1. Nettoyer et désinfecter l'appareil avant sa première utilisation.
2. Si nécessaire, connecter l'égalisation de potentiel.
 - ☞ L'égalisation de potentiel doit être connectée si l'environnement dans lequel est utilisé le produit le nécessite. Respecter les données de la norme IEC EN 60601-1.
3. Vérifier que la tension et la fréquence secteur de l'appareil et du réseau d'alimentation correspondent.
 - ☞ Vous trouverez les données concernant l'appareil sur l'étiquette type.
4. Si la tension et la fréquence réseau correspondent : brancher l'appareil avec le câble d'alimentation livré avec l'appareil, à une prise secteur équipée d'une mise à la terre.
5. Effectuer un contrôle de fonctionnement, voir chapitre „6.2 Contrôle de fonctionnement“ à la page 18.

4 Utilisation

4.1 Conditions environnementales durant l'utilisation


L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation à l'intérieur et des conditions environnementales normales. Protéger les coussins d'une trop grande chaleur.

- Température : +10...+35 °C
- Humidité de l'air relative : 20...95 % sans condensation
- Pression atmosphérique : 700...1060 hPa

Vous ne pouvez séparer l'appareil du secteur qu'en retirant la prise secteur du réseau électrique. Positionner l'appareil de manière à pouvoir à tout moment le séparer facilement du réseau d'alimentation.

4.2 Positionner le patient

Veiller à ce que le patient est bien assis au centre de l'assise. Le patient ne doit pas être assis sur l'accoudoir, le dossier ou le repose-jambes. Ne pas laisser le patient debout de tout son poids sur le repose-pied.

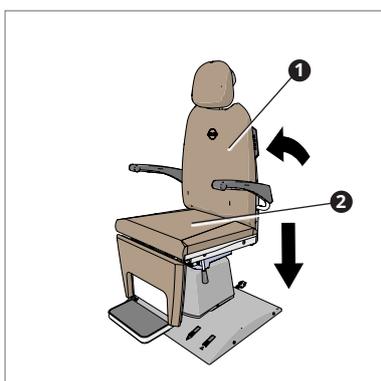

⚠ Risque de renversement en cas de charge mal répartie.

1. Passer le dossier **1** en position verticale.
2. Passer le fauteuil **2** dans sa position la plus basse.
3. Laisser à présent descendre le patient du fauteuil ou se lever.


4.3 Régler le fauteuil patient

⚠ ATTENTION

Risque de contusion en raison de parties en mouvements.

Les doigts du patient peuvent être contusionnés.

- Les bras du patient doivent toujours se trouver sur les accoudoirs quand vous réglez le fauteuil patient.

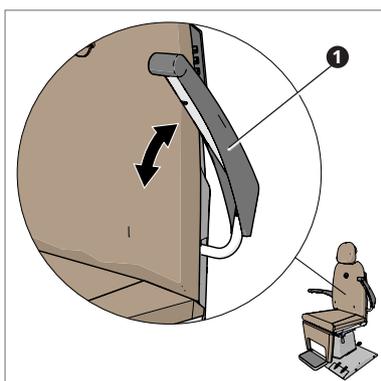

4.3.1 Régler les accoudoirs


Relever les accoudoirs

1. Relever les accoudoirs **1** de manière contrôlée.

Baisser les accoudoirs

ⓘ Accoudoir endommagé : le mouvement de baisse n'a pas été accompagné.

1. Baisser les accoudoirs **1** de manière contrôlée.

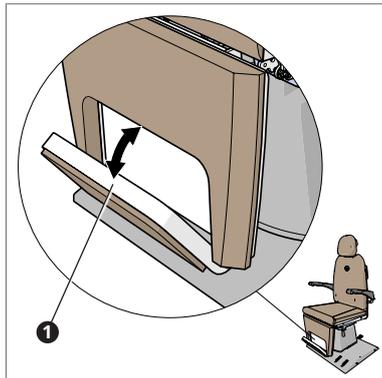


4.3.2 Régler le repose-pied

Sortir le repose-pied

1. Tirer sur la poignée et sortir le repose-pied vers le bas.

Rabattre le repose-pied


1. Rabattre le repose-pied vers le haut.

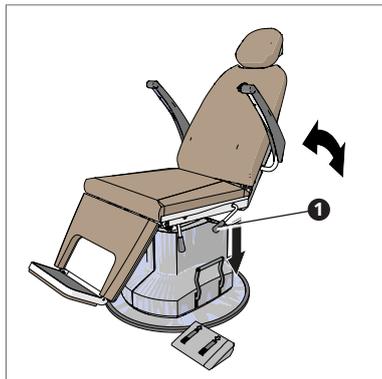

4.3.3 Régler le dossier


Mécanique

1. Pousser le levier de déverrouillage du dossier ① vers le bas et appuyer ou tirer en même temps sur le dossier.
 2. Relâcher le levier de déverrouillage du dossier ① dès que le dossier a atteint la position souhaitée.
- » Le dossier est fixé.

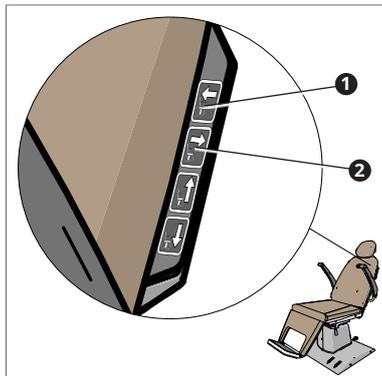

Commandes (Variantes Électrique, Complete)


1. Appuyer sur la touche DOSSIER VERS L'ARRIÈRE ① jusqu'à ce que le dossier atteigne la position souhaitée.
- ☞ Le repose-jambes suit le mouvement de manière synchronisée.
2. Pour remettre le dossier en position verticale, appuyer sur la touche DOSSIER VERS L'AVANT ②.

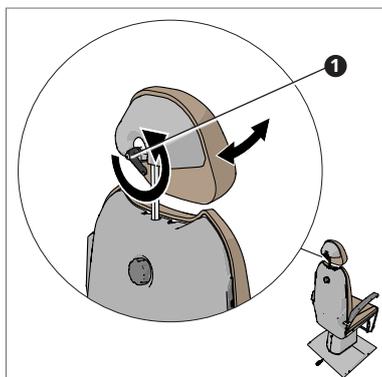

4.3.4 Régler l'appuie-tête


Inclinaison

1. Déverrouiller la vis de blocage pour appuie-tête (inclinaison) ① et placer l'appuie-tête dans la position souhaitée.
 2. Refixer la vis de blocage pour appuie-tête (inclinaison) ①.
- » L'inclinaison de l'appuie-tête est fixée.

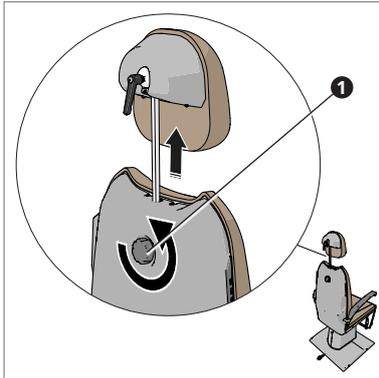


Hauteur

1. Déverrouiller la vis de blocage pour appuie-tête (hauteur) ❶ et placer l'appuie-tête dans la position souhaitée.
 2. Refixer la vis de blocage pour appuie-tête (hauteur) ❶.
- » La hauteur de l'appuie-tête est fixée.

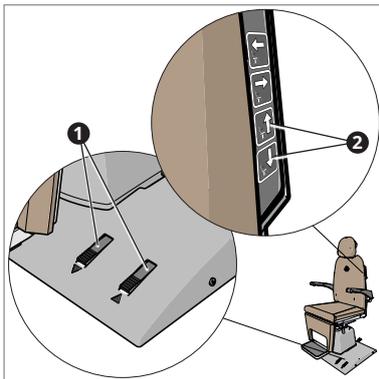


4.3.5 Régler la hauteur d'assise

1. Appuyer sur la pédale correspondante ❶.
- ☞ Variantes Électrique, Comfort : vous pouvez utiliser la touche correspondante située sur le dossier ❷.

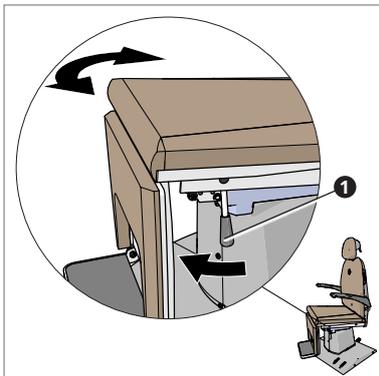

4.3.6 Tourner le fauteuil patient


1. Tirer le levier de déverrouillage Partie supérieure ❶ vers l'avant.
 2. Tourner la partie supérieure du fauteuil.
 3. Pousser le levier de déverrouillage Partie supérieure ❶ vers l'arrière.
- » Le fauteuil patient est fixé.

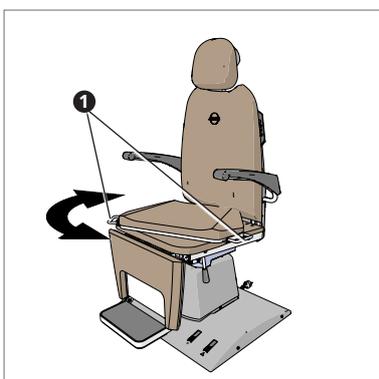

4.3.7 Tourner la surface d'assise (en option)

1. Tourner la surface d'assise à l'aide des deux poignées ❶ dans la direction souhaitée.
- » La surface d'assise s'enclenche.

4.4 Régler la position de choc

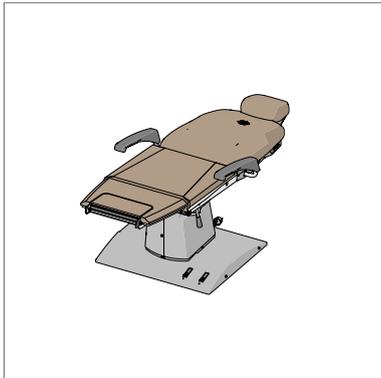

1. Régler l'inclinaison du dossier jusqu'à la position horizontale.


4.5 Déplacer le fauteuil patient (Variantes Mobile, Complete)

AVIS

Domages dus à un déplacement inapproprié du fauteuil patient.

Le fauteuil patient et le câble secteur pourraient être endommagés.


- Ne pas transporter de patient ou de charges avec le fauteuil.
- Ne pas faire rouler le fauteuil patient sur le câble secteur.

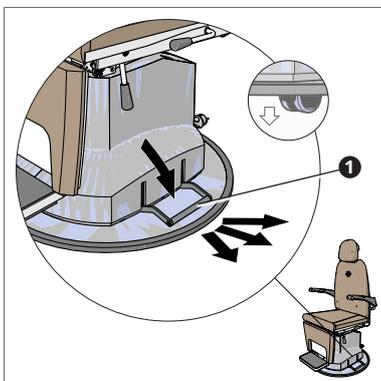

1. Placer le fauteuil dans sa position la plus basse.
2. Passer le dossier en position verticale.
3. Retirer la prise secteur de la prise électrique et poser le câble secteur sur le fauteuil patient.
4. Poser la pédale sur le fauteuil patient.
5. Pousser le levier à pédale ❶ vers le base pour sortir les roulettes.
6. Déplacer le fauteuil jusqu'à la position souhaitée.
7. Pousser le levier à pédale ❶ vers le haut pour rentrer les roulettes.

4.6 Activer et désactiver le verrouillage des commandes

- ☞ Activer le verrouillage des commandes si vous devez laisser seul un patient, ou si les touches ou la pédale peuvent être activées involontairement. Ne laissez jamais des personnes âgées, des enfants, des personnes blessées ou handicapées ou d'autres patients nécessitant une aide seuls sur le fauteuil patient.

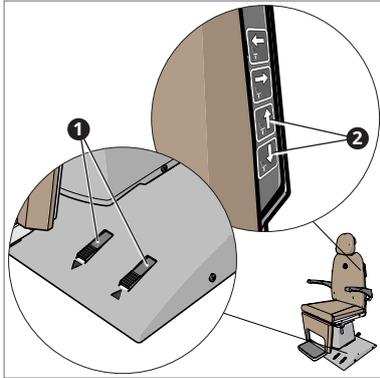

Pédale

1. Appuyer durant 5 secondes en même temps sur les deux pédales **1**.
- » Un signal sonore est audible. Le verrouillage des commandes est activé ou désactivé.

Commandes (Variantes Électrique, Complete)

1. Appuyer durant 5 secondes en même temps sur les touches LEVER LE FAUTEUIL et BAISSER LE FAUTEUIL **2**.
- » Un signal sonore est audible. Le verrouillage des commandes est activé ou désactivé.

5 Nettoyage et désinfection

Nous conseillons de consigner par écrit toute procédure de maintenance et de remplacement.

L'utilisateur est responsable du résultat du nettoyage et de la désinfection. Habituellement, la validation et une surveillance de routine du processus sont nécessaires.

⚠ AVERTISSEMENT

Choc électrique dû à du liquide dans l'appareil.

Risques de brûlures et d'arythmies cardiaques allant jusqu'à la mort.

- Ne pas nettoyer le fauteuil dans une station de lavage ou avec un appareil de nettoyage à haute pression.
- Veiller à ce que le linge de nettoyage soit humide mais pas trempé.
- Nettoyer et désinfecter en respectant les indications d'utilisation.

⚠ ATTENTION

Risque d'infection dû à des sécrétions sur l'appareil ou les accessoires.

Des maladies peuvent être transmises.

- Pour tout nettoyage, porter des gants à usage unique.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Nettoyer et désinfecter en respectant les indications d'utilisation.

5.1 Nettoyage et désinfection des surfaces

Nettoyer l'appareil après chaque utilisation. Désinfecter le fauteuil patient, s'il a été, par exemple, contaminé par des sécrétions, mais au moins une fois par jour.

1. Placer le fauteuil dans sa position la plus basse.
2. Retirer la prise d'alimentation du fauteuil.
3. Humidifier un chiffon propre qui ne peluche pas avec de l'eau savonneuse ou un nettoyant classique pour plastiques.
4. Nettoyer les surfaces avec le chiffon humidifié.
5. Désinfecter les surfaces avec un linge propre sans peluches et un produit de désinfection conseillé.
6. Laisser sécher l'appareil avant une nouvelle utilisation.

5.2 Nettoyage et désinfection des coussins

Retirer immédiatement l'huile, les matières grasses ou la sueur de vos coussins.

Désinfecter le fauteuil patient après chaque utilisation. Désinfecter le fauteuil patient, s'il a été, par exemple, contaminé par des sécrétions, mais au moins une fois par jour.

1. Placer le fauteuil dans sa position la plus basse.
2. Retirer la prise d'alimentation du fauteuil.
3. Utiliser de l'eau savonneuse tiède.
4. Nettoyer les coussins avec un chiffon microfibrés ou une brosse souple.

5. Désinfecter les coussins avec un linge propre sans peluches et un produit de désinfection conseillé. Veiller à ce que le produit désinfectant n'agisse pas plus longtemps que nécessaire.

5.3 Désinfectants conseillés

AVIS

Produits de nettoyage et de désinfection déconseillés.

La surface de l'appareil peut être endommagée, des dommages de corrosion ou des fissures de tension sont possibles.

- N'utiliser **aucun** produit de désinfection contenant l'un des composants suivants :
 - Composants caustiques
 - Composants agressifs vis-à-vis des plastiques, des pièces en acier ou produits graissant.

AVIS

Produits de nettoyage et de désinfection déconseillés.

Les coussins pourraient être endommagés.

- N'utiliser **aucun** produit de désinfection contenant l'un des composants suivants :
 - Solvants ou chlorures
 - Produits de polissage ou à base de cire
 - Produits de nettoyage chimiques
 - Huiles, matières grasses ou alcool
- Utiliser des produits nettoyants avec un pH entre 6 et 8
- Respecter les données du fabricant concernant la concentration et le temps d'action.

Utiliser un produit de désinfection de surfaces correspondant.

6 Maintenance et service

La maintenance, les réparations et les contrôles récurrents ne doivent être effectués que par des personnes disposant des connaissances spécifiques et qui connaissent le produit. Pour l'ensemble de ces mesures, la personne doit disposer des dispositifs de contrôle et des pièces détachées d'origine.

ATMOS conseille : mandater un partenaire de maintenance autorisé par ATMOS. Vous disposez ainsi de l'assurance que les réparations et les contrôles sont faits de manière appropriée, que des pièces d'origine sont utilisées et que vos droits à garantie sont maintenus.

6.1 Contrôles récurrents

Respecter les consignes spécifiques au pays concernant les contrôles récurrents, notamment le contrôle concernant la sécurité électrique.

ATMOS conseille un contrôle tous les 24 mois.

6.2 Contrôle de fonctionnement

Effectuer un contrôle de fonctionnement si vous avez des doutes concernant la sécurité, mais au moins une fois par semaine.

1. Avant chaque utilisation, vérifier que ni le fauteuil ni le câble secteur ne sont endommagés. Contrôler notamment les fissures et les plis.
2. Passer le fauteuil dans la position la plus basse : voir si des bruits ou des odeurs inhabituels surviennent.
3. Variantes Électrique, Complete : modifier le positionnement du dossier et voir si des bruits ou des odeurs inhabituels surviennent.
4. Vérifier que les pièces mobiles peuvent être réglées sans problème :
 - Dossier
 - Accoudoirs
 - Appuie-tête
 - Repose-pied
 - En option : assise rotative
5. Vérifier que le fauteuil peut être tourné sans problème.
6. En cas d'option Mobilité : vérifier que le fauteuil peut être déplacé sans problème.

6.3 Graisser les pièces mobiles

Graisser les pièces mobiles à intervalles réguliers afin que leur fonctionnement ne soit pas entravé.

1. Nettoyer les pièces mobiles de toute salissure.
2. Graisser les axes et les articulations avec une huile ou matière grasse commune.
3. Contrôler toutes les vis de fixation pour vérifier qu'elles soient bien serrées.

6.4 Renvoi de l'appareil

1. Nettoyer et désinfecter l'appareil et les accessoires selon les indications figurant dans la notice d'utilisation.
2. Joindre également les accessoires utilisés avec l'appareil.
3. Compléter le formulaire QD 434 « Réclamation / Bon de retour » ainsi que la **preuve de décontamination**.

- ☞ Le formulaire est joint à l'appareil et est disponible sur www.atmosmed.fr.
- 4. Emballer l'appareil avec les protections nécessaires et un emballage adéquat.
- 5. Joindre le formulaire QD 434 « Réclamation / Bon de retour » ainsi que la **preuve de décontamination**.
- 6. Coller la pochette d'envoi sur l'extérieur de l'emballage.
- 7. Renvoyer l'appareil à ATMOS ou à votre fournisseur.

7 Remédier à certains problèmes

Le produit a subi un contrôle de qualité sur le site de fabrication. Si toutefois vous constatez un dysfonctionnement, vous devriez pouvoir le régler vous-même en suivant les conseils suivants.

Problème constaté	Cause possible	Solution
Le fauteuil patient ne réagit plus après une pression sur les commandes.	Le verrouillage des commandes est activé	1. Déverrouiller le verrouillage des commandes, voir page 15.
Le fauteuil patient ne réagit plus après une pression sur les commandes, un signal sonore retentit.	Plantage du système par ex. en raison de variations dans l'alimentation électrique	1. Maintenir simultanément la pression sur les touches LEVER LE FAUTEUIL et BAISSER LE FAUTEUIL , jusqu'à ce que le signal sonore soit audible puis s'arrête. » Un reset a été effectué.
Des bruits inexplicables apparaissent.	Moteur défectueux ou usé	1. Retirer la prise d'alimentation de l'appareil. 2. Contacter un partenaire de maintenance autorisé par ATMOS.
Le moteur chauffe.		

8 Élimination

Emballage

1. Mettre l'emballage au recyclage.

ATMOS® Chair Professional

Ne pas éliminer l'appareil avec les déchets domestiques.

Variantes : Basic, Mobile : le produit contient de l'huile. L'huile doit être éliminée correctement et ne doit pas pénétrer les sols ou l'eau.



1. Nettoyer et désinfecter l'appareil.

Respecter la réglementation spécifique au pays concernant l'élimination des déchets. Le coffrage peut être entièrement recyclé. Respecter les lois et réglementations spécifiques à chaque pays.

Levier de déverrouillage pour dossier (Variantes Basic, Mobile)

Respecter les informations suivantes si vous ne pouvez pas retourner le produit à ATMOS ou votre distributeur en vue de son élimination.

ATTENTION

Risque de blessure ou de contusion en raison de la forte pression intérieure du vérin à gaz et d'un mouvement soudain de la tige de piston.

Les yeux, le visage et les mains peuvent être blessés.

- Porter un équipement de protection adéquat.
 - Recouvrir l'ouverture de dégazage.
 - Soyez particulièrement prudent si vous activez le mécanisme de déclenchement sur un vérin à gaz démonté.
1. Retirer la pression du vérin à gaz. Respecter pour cela la notice du fabricant du vérin à gaz. Vous trouverez le fabricant sur l'étiquette type.
 2. Faire couler l'huile du vérin à gaz.
 3. Éliminer l'huile de manière appropriée.
 4. Mettre le ressort à gaz au recyclage.

9 Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V~ ± 10 % ; 50/60 Hz
Courant absorbé	Max. 2 A (230 V)
Puissance absorbée	Max. 460 W
Fusibles	T 6,3 A (pour 230 V~, 50/60 Hz)
Hauteur d'assise	58 cm (assise fixe)
Charge maximale	200 kg (charge de travail sûre)
Vitesse de levée	max. 18 mm/s
Hauteur du dossier	Env. 600 mm (sans appuie-tête) Env. 780 mm (appuie-tête en position inférieure)
Rotation	360° +/-165°
• Variantes Basic, Mobile	
• Variantes Électrique, Complete	
Réglage du dossier	+7 à -90
Durée d'utilisation	Service discontinu 2 min / 18 min
Courant de fuite	Max. 0,2 Ω
Courant de fuite de mise à la terre	Max. 0,5 mA
Courant de fuite du coffrage	Max. 0,1 mA
Courant de fuite patient	Max. 0,1 mA
Conditions environnementales Transport / Stockage	
• Température	-10...+50°C
• Humidité de l'air sans condensation	20 . 95 %
• Pression atmosphérique	700...1060 hPa
Conditions environnementales Utilisation	
• Température	+10...+35 °C
• Humidité de l'air sans condensation	20 . 95 %
• Pression atmosphérique	700...1060 hPa
Altitude maximum d'utilisation	≤ 2000 m
Degré de pollution	Classe 1
Catégorie de surtension	II
Dimensions LxIxH	
• Variantes Basic, Électrique	730 x 700 x 1300 mm (Repose-pied rabattu, appuie-tête en position inférieure)
• Variantes Mobile, Complete	730 x 705 x 1300 mm (Repose-pied rabattu, appuie-tête en position inférieure)
Poids	
• Variantes Basic, Électrique	98 kg
• Variantes Mobile, Complete	110 kg
Contrôles récurrents	Conseillé : Contrôle tous les 24 mois.

Classe de protection (EN 60601-1)	I
Degré de protection	Pièces d'utilisation Type B
Catégorie de protection	IP X4
Classification selon Annexe IX directive CE 93/42/CEE	Classe 1 Selon Règle 1 & 12 Paragraphe 3
Certification CE	CE
Code UMDNS	10-794
Ident-Nr. (REF)	535.5200.0 Basic 535.5300.0 Électrique 535.5400.0 Mobile 535.5500.0 Complete

10 Conseils concernant la compatibilité électromagnétique

1. Dès que le fauteuil patient est connecté au réseau d'alimentation, et si un appareil de mesure très sensible est utilisé simultanément, il ne peut pas être exclu que le fauteuil patient influe de manière électromagnétique sur les résultats de mesure.



MedizinTechnik

ATMOS MEDICAL France
3 Allée des Maraîchers
13013 MARSEILLE / France
Tél : + 33 4 91 44 32 94
info@atmosfrance.fr

 GREINER GmbH
Wettestrasse 1
74385 Pleidelsheim / Allemagne
Tél : +49 7144 8112-0
info@greiner-gmbh.de

www.atmosmedical.fr

www.greiner-gmbh.de