


**i** Die Kurz-Gebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.


## Sicherheitshinweise

- Laden Sie den Akku spätestens nach 3 Monaten auf, auch wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Führen Sie nach jedem Gebrauch eine Funktionskontrolle durch. Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, führen Sie alle 4 Wochen eine Funktionskontrolle durch.
- Das Gerät darf nur von medizinisch ausgebildeten Personen angewendet werden, die in die medizinische Absaugung eingewiesen wurden.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Bakterienfilter.

## Geräteübersicht

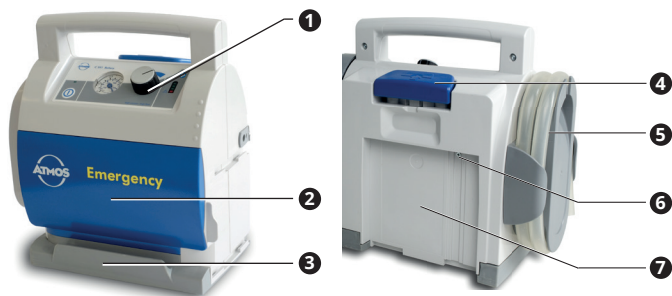


- 1** Bedienfeld
- 2** Akkufachabdeckung
- 3** Gerätefuß
- 4** Entriegelungstaste Wand- und Gerätehalterung
- 5** Schlauchaufwicklung mit Absaugschlauch
- 6** Anschluss Ladezubehör
- 7** Führung für Wand- und Gerätehalterung

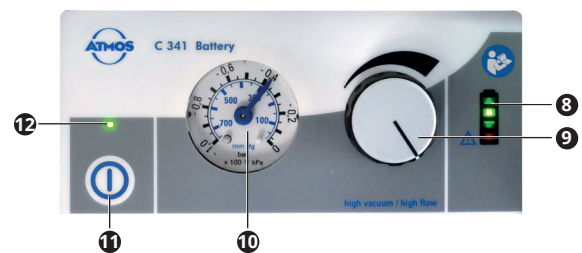

- 8** Anzeige des Akkustatus
- 9** Vakuumregler
- 10** Vakuumanzeige
- 11** Taste Ein / Aus
- 12** Anzeige Betrieb

## Anzeige Akkustatus

- Die folgenden Anzeigewerte gelten nicht, während der Akku geladen wird.
- Der Ladestand muss visuell überwacht werden.
- Falls nur die rote LED leuchtet, obwohl der Akku bereits längere Zeit geladen wurde, ist der Akku defekt.

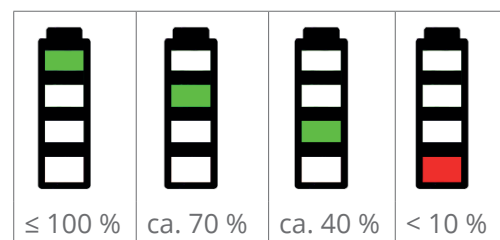

## Halterung

### Anbringen



### Entfernen



## Einschalten und Bedienen

### Einschalten



1. Taste Ein / Aus drücken.
  - » Die Pumpe startet.
  - » Die LED über der Taste Ein / Aus leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet ist.

### Vakuum einstellen



2. Drehen Sie am Vakuumregler, um das gewünschte Vakuum einzustellen.
  - » Die Vakuumanzeige zeigt die aktuelle Saugleistung an.

### Ausschalten



3. Taste Ein / Aus ca. 1 Sekunde drücken.
4. Gerät nach jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren.
5. Nach jeder Reinigung und Desinfektion eine Funktionskontrolle durchführen.

## Reinigung und Pflege

Was	Wie			Wann		
	R	D	S	Täglich*	Alle 14 Tage*	Bei Patientenwechsel / nach jeder Absaugung
Aufzubereitende Teile	Reinigung	Desinfektion	Sterilisation			
<b>Oberflächen</b>						
Gehäuse	X	X		X		X
Gerätefuß	X	X <sup>1</sup>		X		X
Schlauchaufwicklung	X	X <sup>1</sup>		X		X
Wand- und Gerätehalterung	X	X				X
Netz- und Ladegerät	X	X				X
<b>Behältersystem</b>						
DDS-Sekretbehälter	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Behälterdeckel außen (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Behälterdeckel innen (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Schwimmerkugel (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Filterhalter	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Dichtungsring	X	X <sup>1</sup>		X		X
Bakterienfilter					X	X
Fingertip				X		X
Halterung für Behältersystem	X	X <sup>1</sup>		X		X
Absaugschlauch (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X

1) Bevorzugt: maschinelle Reinigung und Desinfektion im RDG (Spülgang bis 95°C)  
 2) Bei Bedarf Heißdampfsterilisation bei 134° C mit Geräten nach EN285

## Funktionskontrolle

### Manuell

1. Prüfen Sie, ob folgende Teile beschädigt oder eingerissen sind:
  - alle Schläuche
  - Behältersystem
2. Gerät einschalten.
3. Prüfen Sie: LEDs und Akkustatus.
4. Fingertip an den Absaugschlauch anschließen und Nebenluftöffnung schließen.
5. Vordere Öffnung des Fingertips mit Daumen verschließen.
6. Vakuum -0,5 bar auswählen.
7. Prüfen Sie, ob das Gerät das Vakuum nach ca. 20 Sekunden erreicht: Die Pumpe schaltet aus und die Vakuumanzeige zeigt -0,5 bar an.
8. Falls das Gerät nicht innerhalb von 20 Sekunden das Vakuum erreicht: Prüfen Sie das Gerät auf mögliche Fehlerquellen.