


Notice rapide ATMOS® C 341 Battery

i La notice rapide ne remplace pas la notice d'utilisation.


Conseils de sécurité

- Recharger la batterie au plus tard tous les 3 mois, même si l'appareil n'est pas utilisé.
- Après chaque utilisation, effectuer un contrôle de fonctionnement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, effectuer un contrôle de fonctionnement toutes les 4 semaines.
- L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes détenant une formation médicale et formées à l'aspiration médicale.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans filtre anti-bactérien.

Vue d'ensemble de l'appareil

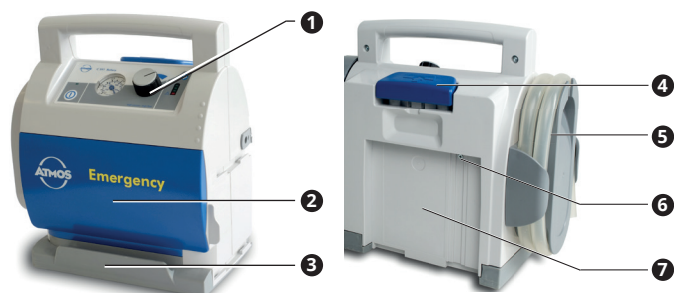


- 1** Commandes
- 2** Clapet espace batterie
- 3** Socle
- 4** Poignée de déverrouillage support mural
- 5** Rangement tubulure avec tubulure d'aspiration
- 6** Connexion chargeur
- 7** Rail pour support mural

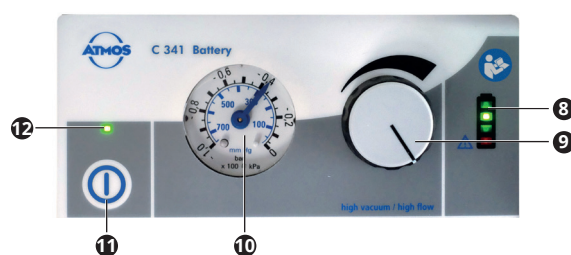

- 8** Affichage de l'état de charge de la batterie
- 9** Régulateur de vide
- 10** Vacuumètre
- 11** Touche Marche/Arrêt
- 12** Affichage de fonctionnement



Affichage de l'état de charge de la batterie

- Les taux d'affichage suivants ne sont pas valables durant la charge de la batterie.
- L'état de charge de la batterie doit être surveillé visuellement.
- Si seule la LED rouge s'allume alors que la batterie est en charge depuis quelque temps, la batterie est défectueuse.

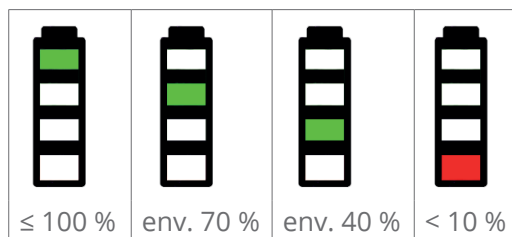

Support pour système de recueil

Mettre en place

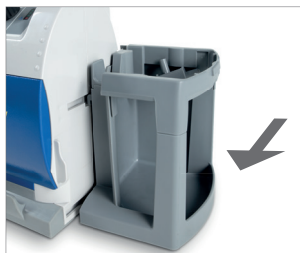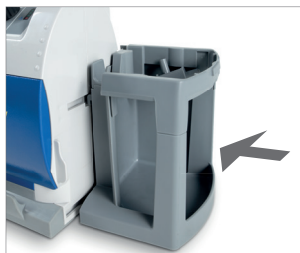

Retirer



Mise sous tension et utilisation

Allumer



- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
 - » La pompe démarre.
 - » La LED située au-dessus de la touche On / Off s'allume dès que l'appareil est allumé.

Régler la dépression



- Tourner le bouton de réglage de la dépression pour régler la dépression souhaitée.
 - » Le manomètre affiche la performance d'aspiration actuelle.

Eteindre



- Appuyer durant env. 1 seconde sur la touche Marche/Arrêt
- Nettoyer et désinfecter l'appareil après chaque utilisation.
- Après chaque nettoyage et désinfection, effectuer un contrôle de fonctionnement.

Nettoyage et entretien

Qui	Quoi			Quand		
Quelle pièce	N	D	S	Quotidien*	Tous les 14 jour*	Changement de patient / Après chaque aspiration
Surfaces						
Coffrage	X	X		X		X
Socle	X	X ¹		X		X
Rangement pour tubulure	X	X ¹		X		X
Support mural et rail	X	X				X
Chargeur	X	X				X
Système de recueil des sécrétions						
Bocal à sécrétions DDS	X	X ¹	X ²	X		X
Couvercle pour bocal à sécrétions, extérieur (DDS)	X	X ¹	X ²	X		X
Couvercle pour bocal à sécrétions, intérieur (DDS)	X	X ¹	X ²	X		X
Bille flottante (DDS)	X	X ¹	X ²	X		X
Support de filtre	X	X ¹	X ²	X		X
Joint	X	X ¹		X		X
Filtre antibactérien					X	X
Stop-vide				X		X
Support pour système de recueil des sécrétions	X	X ¹		X		X
Tubulure d'aspiration (DDS)	X	X ¹	X ²	X		X
	X	X ¹	X ²	X		X

1) Nettoyage et désinfection dans un appareil adéquat (rinçage jusqu'à 95°C)

2) Stérilisation par vapeur à 134° C avec des appareils selon EN285

Contrôle de fonctionnement

Manuel

- Contrôler les pièces suivantes afin de voir si elles sont endommagées ou présentent des fissures :
 - Toutes les tubulures
 - Système de recueil des sécrétions
- Allumer l'appareil.
- Contrôler : Les LEDs et l'état de charge de la batterie.
- Connecter un stop-vide à la tubulure d'aspiration et l'actionner afin d'avoir une aspiration.
- Boucher l'embout biconique avec le pouce.
- Sélectionner la dépression -0,5 bar.
- Vérifier que l'appareil a atteint la dépression souhaitée après environ 20 secondes : la pompe s'arrête et la dépression affichée est de -0,5 bar.
- Si l'appareil n'a pas atteint la dépression au bout de 20 secondes : contrôler l'appareil pour détecter d'éventuelles sources d'erreur.