

**i** Die Kurz-Gebrauchsanweisung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung.


## Sicherheitshinweise

- Laden Sie den Akku spätestens nach 6 Monaten auf, auch wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Führen Sie nach jedem Gebrauch eine Funktionskontrolle durch. Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, führen Sie alle 4 Wochen eine Funktionskontrolle durch.
- Das Gerät darf nur von medizinisch ausgebildeten Personen angewendet werden, die in die medizinische Absaugung eingewiesen wurden.
- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Bakterienfilter.


## Geräteübersicht



- 1** Bedienfeld
- 2** Akkufachabdeckung
- 3** Gerätefuß

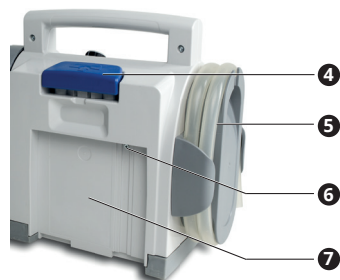


- 4** Entriegelungstaste Wand- und Gerätehalterung
- 5** Schlauchaufwicklung mit Absaugschlauch
- 6** Anschluss Ladezubehör
- 7** Führung für Wand- und Gerätehalterung

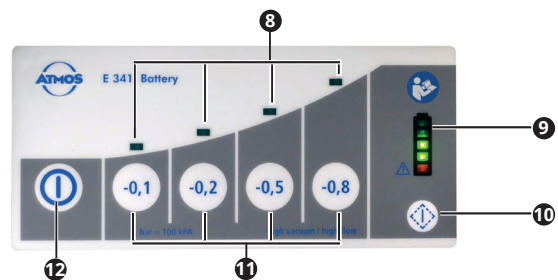

- 8** LEDs zur Anzeige des aktuell vorhandenen Vakuums
- 9** Anzeige des Akkustatus
- 10** Taste Akkustatus
- 11** Tasten zur Wahl des gewünschten Vakuums
- 12** Taste Ein / Aus


## Anzeige Akkustatus

- Kurz bevor der Akku leer ist, ertönt alle 5 Sekunden ein Signalton.
- Falls alle grünen LEDs gleichzeitig oder alle LEDs gleichzeitig blinken, liegt ein Fehler vor.

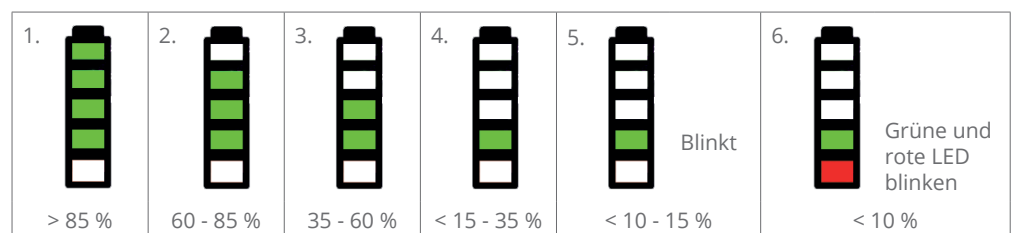


## Halterung

### Anbringen

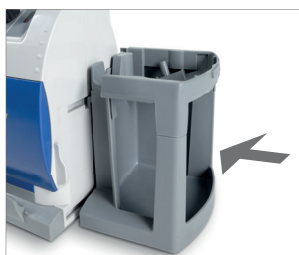

### Entfernen

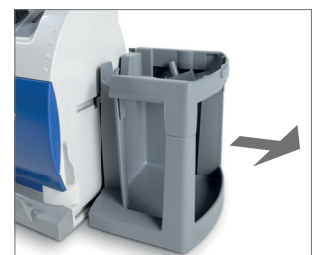

## Einschalten und Bedienen

### Einschalten



1. Taste Ein / Aus drücken.
  - » Die Pumpe startet. Es ist das Vakuum eingestellt, welches zuletzt gewählt wurde.
  - » Alle LEDs auf dem Bedienfeld leuchten etwa 1 Sekunde.
  - » Die Taste Ein / Aus leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet ist.

### Vakuum einstellen



2. Taste des gewünschten Vakuums drücken.
  - » Grüne LED darüber blinkt.

### Ausschalten



3. Taste Ein / Aus ca. 1 Sekunde drücken.
4. Gerät nach jedem Gebrauch reinigen und desinfizieren.
5. Nach jeder Reinigung und Desinfektion eine Funktionskontrolle durchführen.

## Reinigung und Pflege

Was	Wie			Wann		
	R	D	S	Täglich*	Alle 14 Tage*	Bei Patientenwechsel / nach jeder Absaugung
Aufzubereitende Teile						
<b>Oberflächen</b>						
Gehäuse	X	X		X		X
Gerätefuß	X	X <sup>1</sup>		X		X
Schlauchaufwicklung	X	X <sup>1</sup>		X		X
Wand- und Gerätehalterung	X	X				X
Netz- und Ladegerät	X	X				X
<b>Behältersystem</b>						
DDS-Sekretbehälter	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Behälterdeckel außen (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Behälterdeckel innen (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Schwimmerkugel (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Filterhalter	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
Dichtungsring	X	X <sup>1</sup>		X		X
Bakterienfilter					X	X
Fingertip				X		X
Halterung für Behältersystem	X	X <sup>1</sup>		X		X
Absaugschlauch (DDS)	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X
	X	X <sup>1</sup>	X <sup>2</sup>	X		X

1) Bevorzugt: maschinelle Reinigung und Desinfektion im RDG (Spülgang bis 95°C)  
 2) Bei Bedarf Heißdampfsterilisation bei 134° C mit Geräten nach EN285

## Funktionskontrolle

### Manuell

1. Prüfen Sie, ob folgende Teile beschädigt oder eingerissen sind:
  - alle Schläuche
  - Behältersystem
2. Gerät einschalten.
3. Prüfen Sie: LEDs und Akkustatus.
4. Fingertip an den Absaugschlauch anschließen und Nebenluftöffnung schließen.
5. Vordere Öffnung des Fingertips mit Daumen verschließen.
6. Vakuum -0,5 bar auswählen.
7. Prüfen Sie, ob das Gerät das Vakuum nach ca. 20 Sekunden erreicht: Die Pumpe schaltet aus und die grüne LED über der Taste -0,5 bar leuchtet durchgehend.
8. Falls das Gerät nicht innerhalb von 20 Sekunden das Vakuum erreicht: Prüfen Sie das Gerät auf mögliche Fehlerquellen.

### Automatisch

1. Fingertip an den Absaugschlauch anschließen und Nebenluftöffnung schließen.
2. Vordere Öffnung des Fingertips mit Daumen verschließen.
3. Taste Akkustatus ca. 3 Sekunden drücken.
  - » Sobald alle LEDs kurz leuchten, beginnt die Funktionskontrolle. Das erste Ergebnis wird sofort angezeigt.
4. Prüfen Sie die Ergebnisse anhand der Anzeige des Akkustatus.
5. Öffnen Sie den Fingertip erst, wenn keine LED mehr leuchtet. Die Funktionskontrolle ist dann abgeschlossen.