

1 Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung ist gültig für das Schalldämpferset (REF 5752 4929).

1.1 Anwendung

Das Schalldämpferset (REF 5752 4929) dient zur Geräuschminimierung für FINA AIR T 50, FINA AIR D 150, FINA AIR B 800 und FINA AIR P 350.

1.2 Leistungsdaten nach Einbau des Schalldämpfersets



WARNUNG!


Verletzungsgefahr!

Durch den Einbau des Schalldämpfersets reduziert sich die Saugleistung der FINA-Armaturen.

	FINA AIR B 800	FINA AIR P 350	FINA AIR D 150	FINA AIR T 50
Saugleistung	mind. 30 l/min	mind. 14 l/min	mind. 8 l/min	mind. 15 l/min
Max. Vakuum	0 bis -800 kPa	0 bis -350 kPa	0 bis -130 kPa	0 bis -50 kPa
Geräuschminderung	ca. 20 dB(A)	ca. 10 dB(A)	ca. 8 dB(A)	ca. 10 dB(A)

Tab. 1: Leistungsdaten


1.3 Demontage / Montage

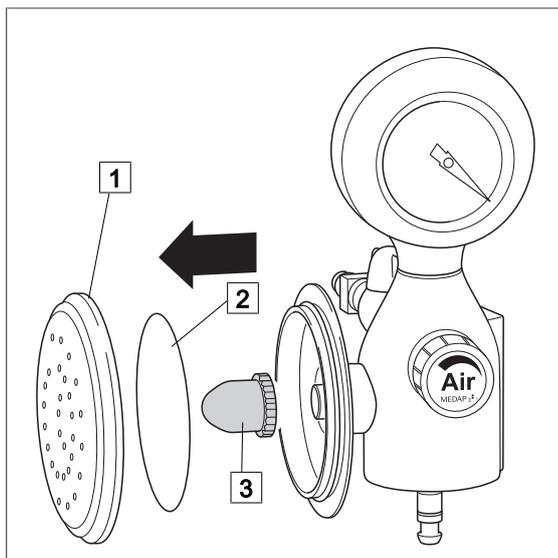

- Bakterienfilterkappe (1) abschrauben.
- Bakterienfilterblatt (2) und Schalldämpfereinsatz (3) entnehmen.
- Schalldämpfereinsatz gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Fig. 1: Demontage FINA AIR B 800 / FINA AIR P 350


Die Demontage von FINA AIR T 50 / FINA AIR D 150 wird am Beispiel der FINA AIR D 150 gezeigt.

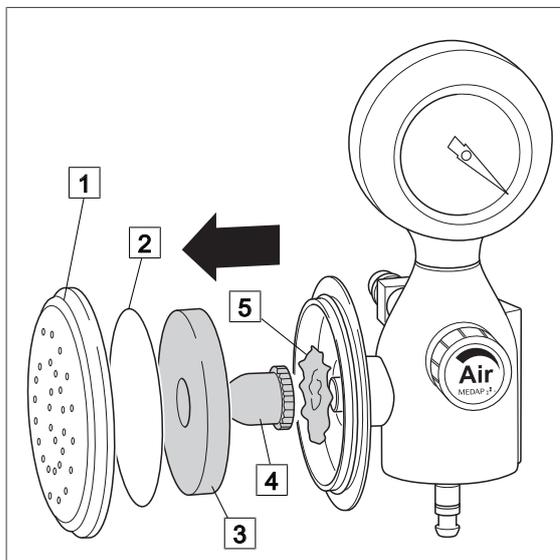

- ☒ Bakterienfilterkappe (1) abschrauben.
- ☒ Bakterienfilterblatt (2), Schaumgummischeibe (3), Schalldämpfereinsatz (4) und Filtermatte (5) entnehmen.
- ☒ Schaumgummischeibe, Schalldämpfereinsatz und Filtermatte gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Fig. 2: Demontage Schalldämpferset
FINA AIR T 50 / FINA AIR D 150

Die Montage des Schalldämpfersets an die FINA-Armaturen wird am Beispiel der FINA AIR B 800 gezeigt.

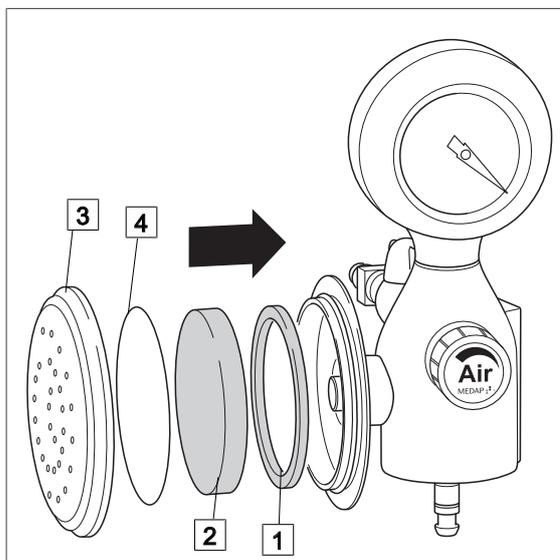

- ☒ Den schmalen Dichtring (1) und den Sinterfilter (2) einlegen.
- ☒ Bakterienfilterkappe (3) mit Bakterienfilterblatt (4) aufschrauben.
- ☒ Entnahmegesät an die zentrale Gasversorgungsanlage anschließen.
- ☒ Regulierventil öffnen.
- ☒ Den zum Sekretbehälter führenden Schlauch abknicken und am Vakuummeter ablesen, ob das Endvakuum gemäß den Leistungsdaten erreicht wird.
- ☒ Wird das Endvakuum nicht erreicht, den schmalen Dichtring durch den mitgelieferten breiten Dichtring ersetzen und Prüfung wiederholen.
- ☒ Wird das Endvakuum erneut nicht erreicht, das Schalldämpferset nicht verwenden. Mit der zuständigen ATMOS-Vertretung in Verbindung setzen.

Fig. 3: Montage FINA AIR B 800

1.4

Herstelleradresse

■ Hersteller:

ATMOS
MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
DEUTSCHLAND
Telefon: +49 7653 689-0
www.atmosmed.com