

Quick Start Guide

ATMOS iQam

Vorbereitung & Inbetriebnahme
Installation & Initial Activation




Ausführliche
Gebrauchsanweisung hier:

Detailed instructions
for use here:



www.atmosmed.link/iqam_downloads

Installieren der Software Install the Software

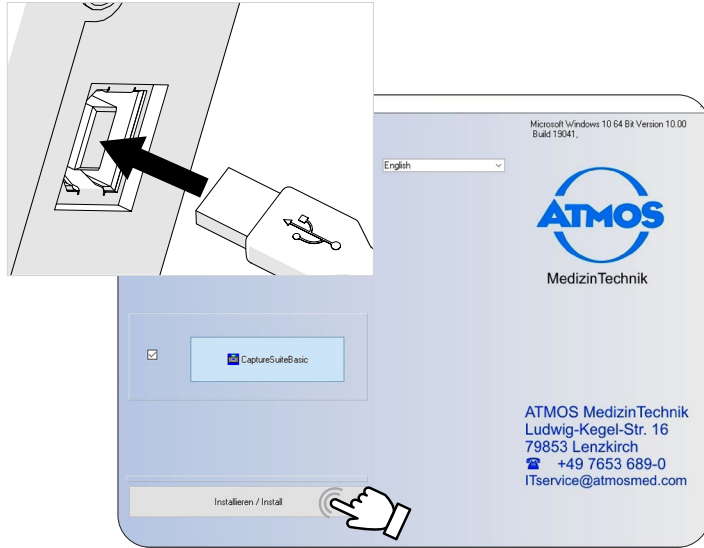


1

1. USB-Stick einstecken
 2. Starten „Install.exe“
 3. „Capture Suite Basic“ installieren
 4. Neustart Computer
1. Plug in USB stick
 2. Start "Install.exe"
 3. Install "Capture Suite Basic"
 4. Restart computer

Der verwendete Computer muss der IEC 62368 entsprechen.
The computer used must comply with IEC 62368.


Anschließen der Kamera Connect the Camera

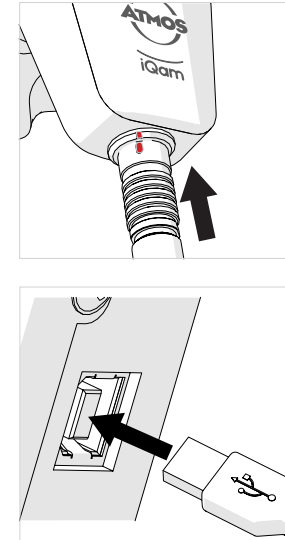

2

1. Kamera und Gerät mit Kabel verbinden
 2. LED leuchtet konstant in Blau
1. Connect camera and device with cable
 2. LED is constantly lit in blue


Konfiguration der Software Configuration of the Software

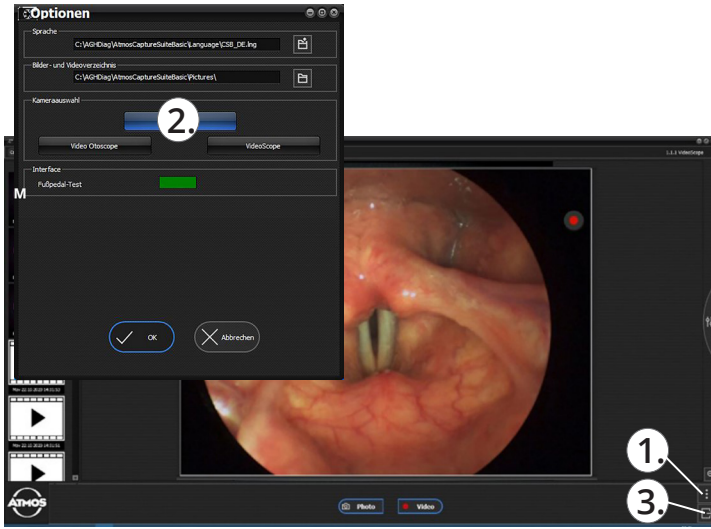

3

1. Capture Suite Basic starten
 2. Optionen öffnen (1.)
 3. ATMOS iQam als Kamera-modul auswählen (2.)
 4. Auswahl mit „OK“ bestätigen
 5. Software schließen (3.) und neustarten
1. Start Capture Suite Basic
 2. Open "Options" (1.)
 3. Choose ATMOS iQam as camera module (2.)
 4. Confirm selection with "OK"
 5. Close software (3.) and restart it

Anschließen des Endoskops Connect the Endoscope

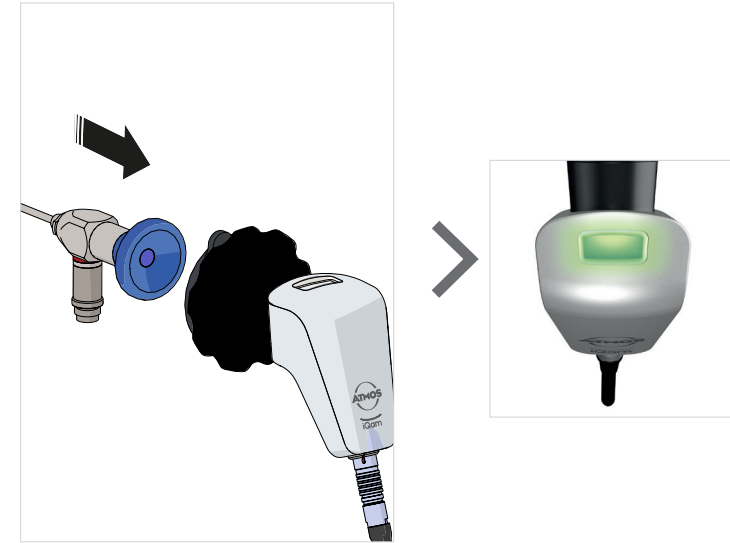


4

1. Endoskop und Kamera koppeln
 2. LED blinkt 1x grün
1. Connect endoscope and camera
 2. LED flashes green once

ATMOS Capture Suite Basic Livebild Anzeige

ATMOS Capture Suite Basic Live Image Display

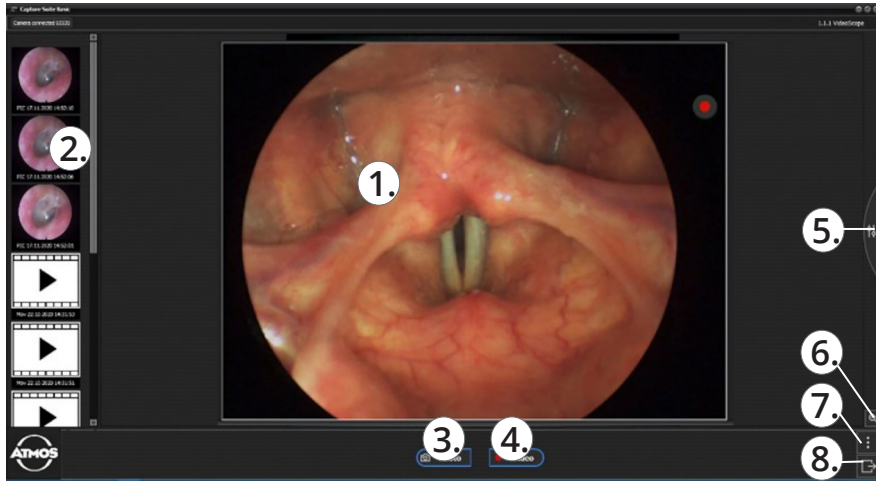


1. Live-Bild
2. gespeicherte Bild-/Videosequenzen
3. Fotoaufnahme
4. Videoaufnahme (Start/Stop)
5. Kameraeinstellungen
6. Vergrößern oder verkleinern
7. Optionen
8. Schließen

1. Live image
2. Saved image / video sequences
3. Photograph
4. Video recording (Start/Stop)
5. Camera settings
6. Zoom in or out
7. Options
8. Close

Einzelbild-/Video-Aufnahme

Snapshot/Video Recording

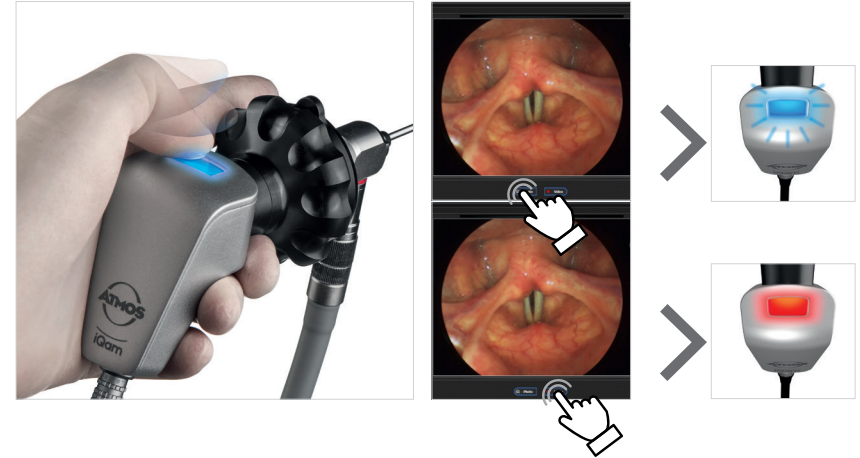

1. Einzelbild- oder Videoaufnahme
2. LED blinkt 1x blau (Einzelbild)
LED leuchtet rot (Video)

1. Snapshot or video recording
2. LED flashes blue once (snapshot)
LED lights up red (video)



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
Tel: +49 7653 689-0
info@atmosmed.com

www.atmosmed.link/iqam