

ATMOS C 11 Systema

Développé par des experts :

Le poste de travail ORL conçu selon un principe modulaire pour un travail efficace



ATMOS

Nous avons repensé le
ORL spécialement p



e poste de travail pour vous!

En tant qu'experts en postes de consultation ORL tout équipés, nous commercialisons des produits de qualité dans le monde entier. C'est pourquoi nous connaissons exactement les besoins des médecins ORL.

Cette expérience nous a conduit à développer l'ATMOS C 11 Systema. Cette unité ATMOS C 11 Systema démontre non seulement notre savoir-faire concernant le flux de travail pour le médecin et le patient, mais chaque ATMOS C 11 Systema est le fruit de notre expérience.

Nous l'appelons: le petit géant organisé.

Pour débiter, une petite unité à bon prix peut être le premier pas – mais peut ensuite grandir avec vos besoins. Cette unité est caractérisée par des matériaux de haute qualité (par ex. une structure en métal), les dernières technologies (technique d'éclairage LED), ainsi qu'un concept d'hygiène réfléchi (unité de lavage d'oreille indépendante et autoclavable).

Ensemble complet...

Utilisation optimale de l'espace – ATMOS C 11 Systema

1 // Microscope

L'intégration à l'unité d'un microscope d'examen de qualité offre de nombreux avantages :

- Accrochage stable sans vibrations
- Indépendance vis-à-vis de l'espace, même en cas de déménagement au sein de l'établissement.

2 // Gestion des instruments

Tous les instruments sont accessibles directement et de manière ergonomique : sur maximum deux niveaux, vous pouvez ranger à votre guise vos instruments, tout en respectant les réglementations strictes d'hygiène. Des instruments supplémentaires peuvent être stockés dans les tiroirs. Un support pour écran et une tablette de rangement sont également disponibles.

3 // Lavage d'oreille

Le module de lavage d'oreille vous permet, à l'aide de l'air comprimé, d'utiliser de l'eau chauffée (env. 37° C) pour le lavage d'oreille. L'unité est ainsi indépendante du réseau d'eau, et ce système permet une hygiène impeccable.

4 // Module d'air comprimé et gestion des sprays

Le module d'air comprimé, utilisé avec les différents flacons, permet l'utilisation des sprays à médicaments, et également le lavage d'oreille à eau tempérée.



5 // Crochet automatique pour lampe frontale

La lampe frontale s'allume automatiquement dès qu'elle est retirée de son crochet, et s'éteint après sa remise en place.



6 // Chauffe miroirs rapide

Une pression suffit pour chauffer rapidement les optiques ou les instruments. En quelques secondes, la buée sur les optiques appartient au passé. Avec fonction d'arrêt automatique!

7 // Gestion des endoscopes

Adapté aux règles d'hygiène et à votre travail : la gestion des endoscopes pour optiques rigides et flexibles permet de séparer les endoscopes propres et souillés.

8 // Table de travail intégrée

Manque de place ? La table de travail augmente la surface de travail et permet l'intégration d'appareils de traitement ou de diagnostic supplémentaires.

9 // LED Light Cube / Source de lumière LED

LED, la lumière de l'avenir.

Nous l'utilisons dès à présent pour nos technologies : elle est silencieuse et ne nécessite pas de maintenance.

Pour les optiques avec et sans câble de lumière, ATMOS C 11 Systema propose la solution optimale pour un éclairage maximal et une longue durée de vie.



10 // Bac à instruments utilisés

Après utilisation de vos instruments, vous pouvez les transmettre rapidement à la désinfection, et conserver ainsi une hygiène parfaite au niveau de votre espace de travail.

L'unité de base...

Moins, c'est parfois plus – ATMOS C 11 Systema

1 // Châssis en métal avec bandeaux et surface de dépôt en polyuréthane

Coffrage en métal résistant à la corrosion avec des surfaces faciles à nettoyer. Les matériaux résistant aux produits de désinfection garantissent le respect des exigences d'hygiène.

2 // Logement pour sprays

Les rangements pour sprays à médicaments (liquides ou poudreux) et deux rangements pour flacons de lavage d'oreille sont intégrés directement au plan de travail.



3 // Logement pour poignée et tuyaux

Logements pouvant recevoir le tuyau d'aspiration et le pistolet pour air comprimé. Des cellules photo-électriques intégrées permettent la mise en route et l'arrêt automatique des différentes fonctions, et perfectionnent ainsi le déroulement de votre travail, en évitant tout geste inutile.

4 // Tiroirs

Un petit et deux grands tiroirs permettent de ranger les consommables et les instruments moins souvent utilisés.

5 // Mobilité

Disponibles en option, quatre roulettes équipées de freins permettent d'utiliser l'ATMOS C 11 Systema à tout moment et n'importe où. Le nettoyage du sol et les déménagements ne sont plus un problème!



6 // Gestion des instruments

Gestion des instruments au niveau de la surface de dépôt : tous les instruments sont accessibles directement et de manière ergonomique.

7 // Connexion source de lumière LED

Vos sources de lumière s'allument automatiquement lorsque vous les retirez de leurs supports, et s'éteignent lors de leur remise en place. La source d'alimentation offre les connexions LED pour votre lampe frontale et la source de lumière pour une connexion directe de vos optiques.



8 // Logements pour réservoirs à endoscopes

Logements pouvant recevoir des tubes pour endoscopes, ergonomiques et hygiéniques grâce à la séparation des endoscopes propres et utilisés.

9 // Pompes d'aspiration puissantes

ATMOS est spécialiste en pompes d'aspiration extrêmement puissantes, et ce depuis des dizaines d'années. L'ATMOS C 11 Systema est également équipée d'un module d'aspiration parfaitement adapté à toutes les utilisations en ORL. Le module d'aspiration démarre automatiquement, dès que le tuyau d'aspiration est retiré de son support.



10 // Gestion des sécrétions et DDS

Vidange manuelle du bocal à sécrétions simple grâce au DDS (Direct-Docking-System). Le bocal à sécrétions est équipé d'une protection anti-débordement et d'un filtre anti-bactérien hydrophobe. Il est également possible d'utiliser des dispositifs de recueil à usage unique.



Unités de base

Unité de base «Position assise»

Unité de base «Position debout»



L'unité de consultation ORL ATMOS C 11 Systema se compose d'un châssis solide, résistant à la corrosion, avec des surfaces faciles à nettoyer, en matière résistant aux produits désinfectants, afin de répondre aux exigences imposées par l'hygiène.

Pour le dépôt des instruments, vous disposez en option de quatre grands plateaux (284 x 184 mm) sur la partie supérieure, ainsi que d'un petit et de plusieurs grands tiroirs pour le rangement des instruments et des consommables.

Le modèle de base offre des possibilités de rangements séparés pour trois optiques propres et trois optiques utilisées.

L'aspiration silencieuse dispose d'une fonction de démarrage automatique dès que le tuyau d'aspiration est retiré de son support. Vous pouvez choisir parmi différents systèmes de bouches à sécrétions, accessibles facilement par l'avant.

La visualisation se fait grâce à deux connexions pour une lampe frontale LED et une source de lumière LED. Ces connexions sont également équipées d'une fonction d'allumage automatique.

De plus, l'unité est équipée de logements pour trois sprays à médicaments ainsi que deux flacons de rinçage.

Grand tiroir (600 x 120 mm)	2x	3x
Dimensions (H x B x T)	840 x 960 x 535 mm	960 x 960 x 535 mm
Petit tiroir (314 x 148 mm)	1x	
Bac à instruments utilisés	En option	
Ouverture latérale pour bouches à sécrétions	✓	
Aspiration	✓	
Alimentations sources LED	2x	
Rangements pour pistolets et tubulures	✓	
Rangements pour réservoir à endoscopes	✓	
Rangements pour fla- cons sprays	✓	
REF	541.0000.0	542.0000.0

Veuillez noter : le système de bouches et les plateaux ne sont pas inclus dans la livraison. Veuillez les commander séparément.

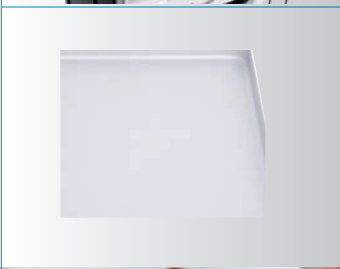
Options et accessoires

Aspiration, Gestion des sécrétions		REF
	Installation pour un bocal à sécrétions ATMOS DDS (incluant bocal 1,5 l)	541.3000.0
	Installation pour deux bocaux à sécrétions ATMOS DDS (avec sélecteur de bocal) Volume max. 6 l, avec sélecteur de bocal. Inclus dans la livraison : 1 x bocal 3 l, 1 x bocal 1,5 l	541.3100.0
	Bocal à sécrétions ATMOS DDS 1,5 l	340.0050.0
	Bocal à sécrétions ATMOS DDS 3 l	340.0051.0
	Installation pour système de recueil à usage unique Receptal®	541.3200.0
	Pour une utilisation non visible de poches d'aspiration 1 l Receptal® dans l'espace de maintenance. Inclus dans la livraison: 1 x bocal extérieur 1 l Receptal®, 1 x poche d'aspiration 1 l Receptal®	312.0464.0
	Bocal extérieur 1 l Receptal®	312.0463.0
	Poches d'aspiration 1 l Receptal®, non autoclavable, 50 pièces	
	Installation pour système de recueil à usage unique Serres®	541.3300.0
	Pour une utilisation non visible de poches d'aspiration 1 l Serres® dans l'espace de maintenance. Inclus dans la livraison : 1 x bocal extérieur 1 l Serres®, 1 x poche d'aspiration 1 l Serres®	312.0465.0
	Bocal extérieur 1 l Serres®	312.0466.0
	Poches d'aspiration 1 l Serres®, non autoclavable, 36 pièces	
	Installation pour système de recueil à usage unique Médi-Vac®	541.3400.0
	Pour une utilisation non visible de poches d'aspiration 1 l Médi-Vac® dans l'espace de maintenance. Inclus dans la livraison: 1 x bocal extérieur 1 l Médi-Vac®, 1 x poche d'aspiration 1 l Médi-Vac®	312.0473.0
	Bocal extérieur 1 l Médi-Vac®	312.0474.0
	Poches d'aspiration 1 l Médi-Vac®, non autoclavable, 50 pièces	
	Installation pour système de recueil à usage unique Bemis®	541.3500.0

Module Air comprimé		REF
	Module d'air comprimé	541.1000.0
	Air comprimé max. 2,2 bars de pression, débit de la pompe : 18 l/min.	
	Veillez noter : pistolet à commander séparément.	
	Pistolet Air comprimé, connexion droite A connecter sur le tuyau du module d'air comprimé. Caractéristiques : adaptation rapide aux différents sprays à médicaments Attention : nécessite le module d'air comprimé avec tubulure (REF 541.1000.0).	541.1010.0
	Pistolet Air comprimé avec ouverture, connexion droite Identique à 541.1010.0, mais avec une ouverture pour une adaptation rapide aux sprays à médicaments et aux flacons de lavage d'oreille.	541.1110.0

Sprays à médicaments		REF
	Spray droit pour médicaments liquides Inclus le flacon	506.5225.0
	Spray dirigeable pour médicaments liquides ou huileux Inclus le flacon	506.5120.0
	Spray pour médicaments poudreux Inclus le flacon	505.0253.0
	Flacon spray A adapter sur les sprays droits ou dirigeables	000.0577.0

Options et accessoires

Sprays à médicaments		REF
	Tube de rechange pour spray droit	505.0280.0
	Tube de rechange pour spray dirigeable (orientable sur 360°)	000.0219.0
	Tuyau de remplacement pour spray après changement de médicaments 10 pièces	506.5229.0
Lavage d'oreille		REF
	Module de lavage d'oreille par air comprimé Système de rinçage à eau chaude à connecter sur le module d'air comprimé. Des réservoirs d'eau chauffée à température corporelle mettent à disposition 250 ml pour le rinçage d'oreille (Remplissage par l'utilisateur avec de l'eau distillée ou stérile). Rinçage de l'oreille par tige d'irrigation avec protection anti-éclaboussure, après adaptation du bocal de réserve d'eau au pistolet d'air comprimé. Inclus dans la livraison : 2 réservoirs à eau à 250 ml (REF 508.0451.0), tige 80 mm (REF 508.0427), embout d'irrigation, 30 pièces (REF 502.0844.0), protection anti-éclaboussures (REF 501.0331.0), joint (REF 501.0331.1) Le système nécessite : Module d'air comprimé avec tuyau (sans pistolet) (REF 541.1000.0) et pistolet Air Comprimé avec ouverture (REF 541.1110.0)	541.1100.0
	Petite cuvette haricot pour rinçage d'oreille Cuvette à connecter au système d'aspiration	505.0353.0
Gestion des instruments et des appareils		REF
	Bac à instruments utilisés Tiroir permettant de stocker les instruments utilisés. Les instruments sont déposés, tiroir fermé, dans le bac en plastique (bac à instruments utilisés). Le tiroir peut être ouvert pour faciliter le remplacement du bac à instruments utilisés. Inclus dans la livraison : : bac à instruments utilisés avec couvercle (REF 506.7751.0 + 506.7752.0)	541.1200.0
	Dépôt des instruments, un niveau Avec couvercle, espace pour trois grands plateaux	541.1300.0
	Dépôt des instruments, deux niveaux Dépôt supplémentaire avec couvercle, espace pour six grands plateaux Partie inférieure à tirer vers l'avant.	541.1400.0
	Plateau à instruments, mélaminé, petit (dimensions : 190 x 150 mm)	000.0746.0
	Plateau à instruments, mélaminé, grand (dimensions : 190 x 300 mm)	000.0747.0
	Plateau à instruments, aluminium anodisé, petit (dimensions : 184 x 142 mm)	508.0058.0
	Plateau à instruments, aluminium anodisé, grand (dimensions : 284 x 184 mm)	505.0516.0
	Plateau à instruments, acier inoxydable, petit (dimensions : 180 x 140 mm)	508.0058.2
	Plateau à instruments, acier inoxydable, grand (dimensions : 280 x 180 mm)	505.0516.2
	Chaufe-miroirs rapide Rayons chauffants activables électriquement pour chauffage rapide des optiques et des instruments, avec arrêt automatique. Attention : en cas de montage du chauffe-miroir rapide, un réservoir pour optiques souillées est retiré.	541.1500.0

Options et accessoires

Gestion des instruments et des appareils		REF
	Support à instruments dentelé, petit Pour le rangement d'instruments sur petits plateaux. Convient pour les petits plateaux à instruments.	508.0567.0
	Support à instruments dentelé, grand Pour le rangement d'instruments sur grands plateaux. Convient pour les grands plateaux à instruments.	508.0566.0
	Support pour olives Politzer (sur petits plateaux) Pour le rangement d'olives sur petits plateaux à instruments. Convient pour les petits plateaux à instruments.	508.0545.0
	Attention: les plateaux à instruments ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément.	

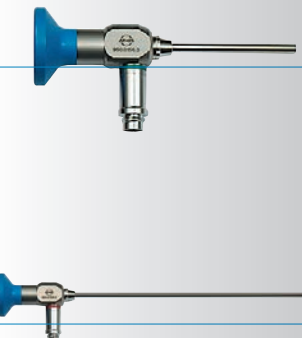
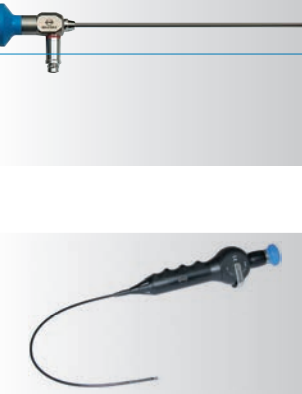
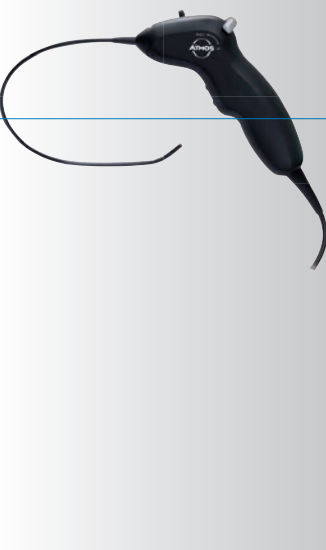
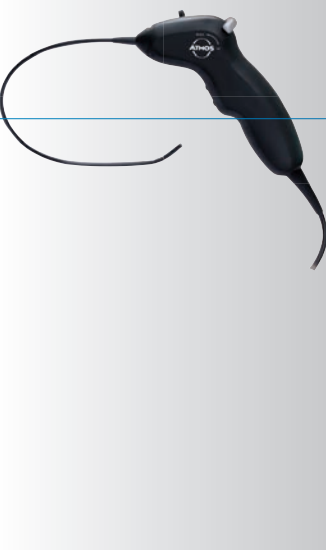
Possibilités d'upgrade		REF
	Tablette métal laquée, étroite (à monter sur ATMOS C 11 Systema) Dimension (L x P) : 650 x 300 mm, Hauteur 515 cm	541.1600.0
	Tablette métal laquée, large (à monter sur ATMOS C 11 Systema) Dimension (L x P) : 800 x 300 mm, Hauteur 515 cm	541.2700.0
	Ajout latéral (Position assise). Plan de travail supplémentaire pour ATMOS C 11 Systema Dimensions (H x L x P) : 765 x 1100 x 520 mm	541.1700.0
	Ajout latéral (Position debout). Plan de travail supplémentaire pour ATMOS C 11 Systema Dimensions (H x L x P) : 885 x 1100 x 520 mm	542.1100.0
	Ajout latéral arrondi (Position assise) Dimensions (H x L x P) : 765 x 999 x 852 mm	541.1800.0
	Ajout latéral arrondi (Position debout) Dimensions (H x L x P) : 885 x 999 x 852 mm	542.1200.0
	Module plan de travail droit (Position assise) Plan de travail avec meuble supplémentaire 5 tiroirs	541.1900.0
	Module plan de travail droit (Position debout) Plan de travail avec meuble supplémentaire 6 tiroirs	542.1000.0
	Module plan de travail arrondi (Position assise) Plan de travail avec meuble supplémentaire 5 tiroirs	541.2900.0
	Module plan de travail arrondi (Position debout) Plan de travail avec meuble supplémentaire 6 tiroirs	542.1300.0
	Mobilité (Set de roulettes pour ATMOS C 11 Systema) Attention : ne peut pas être combiné avec les options d'ajout latéraux ou micro-scope.	541.2000.0

Visualisation		REF
	ATMOS LED Light Cube Module d'éclairage 2 canaux pour systèmes avec câbles de lumière, avec lumière LED haute performance. Caractéristiques: - source de lumière LED 2 canaux pour câbles de lumière. - Allumage automatique de la lumière - Adaptateur disponible pour câble de lumière avec connexion Storz, Wolf, Pentax, Olympus, ACMI Caractéristiques techniques: Luminosité: min. 180 klx (comparable à la lumière halogène 250 W et Xénon 50 W). Longévité de la source de lumière LED : 50.000 h. Livraison : module d'éclairage, 2 x adaptateurs pour câble de lumière avec connexion ATMOS/Storz. A noter : adaptateur pour câble de lumière d'autres fabricants à commander séparément.	541.2100.0

Options et accessoires

Light Cube		REF
	Module de lumière froide Module d'éclairage 1 canal, intégré à l'ATMOS C 11 Systema pour les systèmes à câble de lumière, avec lumière LED haute performance. Caractéristiques: - source de lumière LED 1 canal pour câbles de lumière - Allumage automatique de la lumière - Adaptateur disponible pour câble de lumière avec connexion Storz, Wolf, Pentax, Olympus, ACMI Caractéristiques techniques : Luminosité : min. 80 klx (comparable à la lumière halogène 150 W). Longévité de la source de lumière LED : 50.000 h. Température de la lumière 5.600 K. Livraison : module d'éclairage, 1 x adaptateurs pour câble de lumière avec connexion ATMOS/Storz. A noter : adaptateur pour câble de lumière d'autres fabricants à commander séparément.	541.2800.0
Lampes frontales et source de lumière		REF
	Crochet lampe frontale avec allumage automatique Crochet pour rangement de la lampe frontale à LED au-dessus du plan de travail	541.2400.0
	ATMOS HL 21 LED Lampe frontale LED avec lumière LED haute performance. Longévité env. 50.000 heures, optique de focus réglable sans paliers. Inclus dans la livraison : lampe frontale, câble 2 m, pince de fixation pour câble.	530.4020.0
	Lampe frontale selon Binner avec bandeau, 90° Lampe frontale avec câble de lumière, modèle léger, câble de lumière L = 2,2 m, connexion 90°, adaptateur Storz pour connexion aux sources de lumière froide. A noter : nécessite le Light Cube (REF 541.2100.0)	502.0515.5
	Lampe frontale selon Binner sans bandeau, 90°	502.0516.0
	ATMOS LS 21 LED pour ATMOS C 11 Systema Source de lumière LED pour connexion directe aux endoscopes et laryngoscopes. Avec lumière LED haute performance, 2 W/200 kLux / 175 Lumen, faible coût d'utilisation grâce à la longévité de la LED d'env. 50.000 heures, avec connexion rapide aux optiques de votre choix, câble 1,9 m. Livraison : 1 x source de lumière LED, 1 x adaptateur Wolf, notice d'utilisation	541.4300.0
	ATMOS LS 21 LED, lumière jaune pour ATMOS C 11 Systema	541.4400.0
Adaptateur pour câbles de lumière		REF
	Avec connexion ATMOS / Storz	530.6100.0
	Avec connexion Olympus	530.6101.0
	Avec connexion Pentax	530.6102.0
	Avec connexion Wolf	530.6103.0
	Avec connexion ACMI	530.6104.0

Options et accessoires

Endoscopes		REF
	Laryngoscopes, autoclavables, sans câbles de lumière	
	Laryngoscope 70°, ø 10 mm, longueur de travail 176 mm	950.0209.0
	Laryngoscope 90°, ø 10 mm, longueur de travail 174 mm	950.0210.0
	Laryngoscope 70°, ø 8 mm, longueur de travail 166 mm	950.0246.0
	Télé-Lupen-Laryngoscope 70°, ø 10 mm, longueur de travail 147.5 mm (peut être immergé)	950.0211.0
	Télé-Lupen-Laryngoscope 90°, ø 10 mm, longueur de travail 145 mm (peut être immergé)	950.0212.0
	Otoscopes, autoclavables	
	Optique d'oreille 0°, ø 4 mm, longueur de travail 50 mm	950.0213.0
	Optique d'oreille 30°, ø 4 mm, longueur de travail 50 mm	950.0214.0
	Optique d'oreille 0°, 2,7 mm, longueur de travail 34 mm (peut être immergé, inclut adaptateur pour spéculum d'oreille)	950.0215.0
	Endoscopes Nez / Larynx, autoclavables	
	Optique 0°, ø 4 mm, longueur de travail 180 mm	950.0216.0
	Optique 30°, ø 4 mm, longueur de travail 180 mm	950.0217.0
	Optique 45°, ø 4 mm, longueur de travail 180 mm	950.0218.0
	Optique 70°, ø 4 mm, longueur de travail 180 mm	950.0219.0
	Optique 0°, ø 2,7 mm, longueur de travail 110 mm	950.0220.0
	Optique 30°, ø 2,7 mm, longueur de travail 110 mm	950.0221.0
Endoscopes flexibles		REF
	Nasopharyngoscope haute résolution, ø 3,2 mm	950.0243.0
	Longueur de travail 300 mm, 0°, angle de vision 80°, profondeur de champ 5 mm jusqu'à l'infini, béquillage 125°/125° Inclus dans la livraison : nasopharyngoscope, mallette de transport en aluminium, testeur d'étanchéité.	
	ATMOS Scope – Vidéonasopharyngoscope flexible avec source de lumière LED et chip caméra intégrés	950.0300.0w
	Système de visualisation avec technologie LED et chip caméra intégrés pour une utilisation simple. Unité de guidage avec connexions au moniteur et PC/ordinateur portable. Possibilité d'ajouter ATMOS Cam, ATMOS Strobo 21 LED et/ou ATMOSoft. Caractéristiques techniques : dimensions de l'unité de guidage : 243 x 65,5 x 229,5 mm (L x H x P). Alimentation : 100-240 V AC, consommation : ax. 30 VA, diamètre de la sonde : 3,8 mm, longueur de la sonde : 300 mm, béquillage : 2 x 160°, angle de vue : 0°, angle d'ouverture : 80°, focus : 6-60 mm, signal vidéo analogique : NTSC, capteur d'image 82.000 pixels, sorties : 2 x vidéo composite (FBAS), USB 2.0, interface ATMOS Strobo 21 LED. Inclus dans la livraison : Vidéonasopharyngoscope flexible, unité de guidage, câble d'alimentation, notice d'utilisation, 2 x câbles de connexion BNC avec connexion Cinch, microphone, testeur d'étanchéité.	

Options et accessoires

Câble de lumière		REF
	Câble de lumière haute performance, ø 4,8 mm, L = 1,8 m, connexion Storz droite	950.0152.0
	Câble de lumière, ø 3,5 mm, L = 1,7 m, connexion Storz, droite	508.0663.0
	Câble de lumière, ø 3,5 mm, L = 1,8 m, connexion Storz, 90°	508.0664.0
Gestion des endoscopes		REF
	Gestion des endoscopes 1 canal pour optiques rigides, pour un stockage rapide et sûr des endoscopes (longueur max. 190 mm) Inclus dans la livraison : 1 x bague noire, 1 x réservoir plastique (ouvert) pour le stockage d'endoscopes propres, 1 x réservoir plastique (ø 35 mm) pour le stockage des endoscopes utilisés (peut être rempli avec des produits désinfectants)	541.4000.0
	Gestion des endoscopes 1 canal pour optiques flexibles, pour un stockage rapide et sûr des endoscopes (longueur max. 500 mm) Inclus dans la livraison : 1 x bague noire pour réservoir métal (ø 18 mm), 1 x réservoir métal (ø 18 mm) pour le stockage d'endoscopes propres, 1 x guide en téflon pour réservoir métal (ø 18 mm), 1 bague noire pour réservoir métal (ø 35 mm), 1 x réservoir métal (ø 35 mm) pour le stockage des endoscopes utilisés (peut être rempli avec des produits désinfectants), 1 x guide en téflon pour réservoir métal (ø 35 mm)	541.4100.0
	Gestion 1 canal pour ATMOS Scope Inclus dans la livraison : 1 x bague noire pour réservoir métal (ø 18 mm), 1 x réservoir métal (ø 18 mm) pour le stockage de l'ATMOS Scope propre, 1 x support en téflon pour réservoir métal (ø 18 mm), 1 bague noire pour réservoir métal (ø 35 mm), 1 x réservoir métal (ø 35 mm) pour le stockage de l'ATMOS Scope utilisé (peut être rempli avec des produits désinfectants), 1 x guide en téflon pour réservoir métal (ø 35 mm)	541.4200.0
Fixation microscope et écran		REF
	Support écran sur l'unité	541.2200.0
	Colonne de microscope pour intégration à l'ATMOS C 11 Systema	541.2300.0
	Support écran sur colonne microscope	541.2500.0
	Ecran médical 15" vidéo/PC Ecran médical pour connexion à l'ATMOS Scope et l'ATMOS Cam Caractéristiques techniques : Performance : 36 W, Poids : 4,8 kg, Alimentation : 100 – 240 V Inclus dans la livraison : Moniteur, alimentation médical, câble Pin D-Sub , câble 24 Pin DVI-D, câble S-vidéo, câble CVBS, notice d'utilisation, CD-ROM. Veuillez noter : le moniteur peut être connecté par l'interface FBAS à l'ATMOS Cam 21/31. Les entrées DVI et VGA ne sont pas compatibles avec l'ATMOS Cam 21/31.	534.3005.0

Gamme de fauteuils

Gamme de fauteuils		REF
	ATMOS Chair 21 P Fauteuil patient alliant prix et design fonctionnel Fauteuil patient inclinable avec réglage précis manuel, avec fixation au sol Disponible dans les coloris: ▪ Basic-bleu gris et ▪ Blanc-bleu gris	503.0700.0 503.0730.0
	ATMOS Chair 31 P Excellent rapport qualité/prix. Ce fauteuil à réglage électrique convainc également par son design ergonomique. Disponible dans les coloris: ▪ Basic-bleu gris et ▪ Blanc-bleu gris	503.0800.0 503.0802.0
	ATMOS Chair 21 D Ce fauteuil praticien reprend le design des fauteuils ci-dessus et offre la meilleure ergonomie pour de longues journées de consultation. Disponible dans les coloris: ▪ Basic-bleu gris et ▪ Blanc-bleu gris	503.0750.0 503.0740.0
	ATMOS Chair M 2 Le classique pour le confort du patient : ce fauteuil convient pour des examens en position normale d'examen, mais peut être incliné jusqu'à l'horizontale. Disponible dans les coloris: ▪ Océan ▪ Saphir ▪ Basic ▪ Turquoise ▪ Blanc ▪ Noir	537.0000.0 535.2100.0 535.2200.0 535.2300.0 535.2400.0 535.2500.0 535.2600.0
	ATMOS Chair 51 D Assorti à l'ATMOS Chari M2, ce fauteuil offre non seulement un excellent confort d'assise allié à des roulettes de qualité, mais aussi un dossier tournant qui peut servir de support au bras pendant la consultation Disponible dans les coloris: ▪ Océan ▪ Saphir ▪ Basic ▪ Turquoise ▪ Blanc ▪ Noir	503.0461.0 503.0462.0 503.0464.0 503.0463.0 503.0465.0 503.0466.0



Pour vous aussi, nous
avons la combinaison qu'il
vous faut !

N'hésitez pas à nous
contacter : nous sommes là
pour vous conseiller.



Contact :
ATMOS MEDICAL France
3 Allée des Maraîchers
13013 MARSEILLE / France
Tél : + 33 4 91 44 32 94