

ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS
MEDAP-VENTA SP 26 N
MEDAP-VENTA SP 26 A





UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE ASPIRATION SANS CONTRAINTE VENTA SP 26



Progrès oblige : grâce à un grand nombre de nouveautés techniques surprenantes et un design novateur, les aspirateurs de mucosités électriques portables VENTA SP 26 N et VENTA SP 26 A répondent à tous les souhaits. Avec un débit de 26 litres free flow/minute et un vide pouvant atteindre -80 kPa, les aspirateurs de mucosités performants aspirent silencieusement le sang, les sécrétions, les vomissements et les sérosités à partir des orifices naturels ou artificiels. Ils sont donc parfaitement appropriés pour l'aspiration bronchique nasale et orale de même que pour l'endoscopie.

Les aspirateurs de mucosités portables sont parfaitement adaptés à une utilisation universelle en continu en secteur hospitalier comme en cabinet médical, dans des établissements d'assistance aux personnes âgées et dépendantes, pour le patient soigné à domicile ou en service d'assistance médicale militaire. Ils permettent de respirer sans contraintes et améliorent la qualité de vie des patients.

TECHNIQUE RÉVOLUTIONNAIRE AVEC UN DESIGN NOUVEAU VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A

Appareil complet VENTA 26 N

Révolutionnaire : vide réglable en continue et en toute simplicité dotée d'un contrôle visuel unique en son genre

Facile à transporter : grâce à un faible poids et à une poignée de transport intégrée

Silencieux et sans vibration : le moteur à pistons performant de développement récent est si silencieux qu'on le perçoit à peine même en fonctionnement continu – contribue au bien-être des patients.

Utilisable universellement : un support d'aspirateur spécifique (voir accessoire) contribue à permettre de fixer le VENTA SP 26 quasiment partout.

Fiable au maximum : VENTA SP 26 ne peut fonctionner qu'une fois un filtre hydrophobe antibactérien et antiviral installé.

Interface mécanique normalisée : logement porte-appareil latéral selon la norme DIN EN ISO 19054 pour une fixation universelle des boccas à sécrétions d'un poids inférieur à 1000 g

Design compact et élégant : il n'est pas uniquement beau, il est également on ne peut plus pratique, ce qui facilite le nettoyage.

Bien visible de loin : l'interrupteur marche/arrêt est équipé d'une diode lumineuse qui s'éclaire en bleu une fois le VENTA SP 26 allumé.

Très bonne acceptation : le fait est que plus un appareil médical est fiable, plus il est simple d'utilisation et notamment moins on l'entend, plus son degré d'acceptation est élevé – en milieu hospitalier comme chez le patient soigné à domicile. La nouvelle génération des aspirateurs de mucosités VENTA SP 26 satisfait admirablement à ce profil d'exigence. Le moteur à pistons performant de développement récent travaille très silencieusement et ne génère pas de vibration.

À la portée de tous : le design des nouveaux aspirateurs de mucosités met en évidence qu'il est également possible d'allier élégance et profusion de nouvelles caractéristiques techniques innovantes. À l'instar de leurs prédécesseurs,

ils convainquent notamment par leur matériau longue durée et leur confort hygiénique élevé. VENTA SP 26 offre une protection complète contre la sur-aspiration, il est facile à nettoyer et est vraiment simple à entretenir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VENTA SP 26 N	
Débit d'aspiration	26 l/min +/-3 l
Vide	env. -80 kPa
Tension	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant maxi	440 mA
Puissance maxi absorbée	115 VA
Mode de fonctionnement	fonctionnement continu
Dimensions (l x h x p) en mm	275 x 275 x 160
Poids	3,7 kg
Volume du bocal à sécrétions	1,0 l
Classification conformément à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE	II a



Le filtre hydrophobe antibactérien et antiviral évite les erreurs d'utilisation et économise des coûts de réparation.



Vide réglable en continu de 0 à -80 kPa



La position de la molette indique immédiatement le vide réglé.



Contrôle visuel exceptionnel grâce à un manomètre de 63 mm et aux chiffres de grande taille parfaitement lisibles.

Trop-plein 100 % efficace : la pénétration de liquides ainsi que de bactéries et virus au sein de la pompe entraîne des frais de réparation élevés. Grâce à un mécanisme spécifique, les nouveaux modèles du VENTA SP 26 ne peuvent être utilisés qu'avec le filtre hydrophobe antibactérien et antiviral. Une suraspiration des appareils est par conséquent exclue. Le filtre hydrophobe antibactérien et antiviral particulièrement performant offre également une sécurité extrême en cas de formation de mousse et protège les patients et le personnel de toute infection.

Une innovation unique en son genre : un vacuummètre pourvu notamment d'un grand écran avec un diamètre étendu de 63 mm ainsi que de chiffres plus grands contribue considérablement à la lisibilité. Le régulateur de vide de forme arrondie intégrée attire également le regard. Le vide peut ainsi être précisément dosé en

fonction des besoins et, sans plier le tuyau de raccord à vide. Le réglage se fait en continu jusqu'à -80 kPa. Le réglage du vide se fait très facilement d'un seul doigt, posé sur la molette. Autre avantage : la molette reste sur la position de vide réglé actuellement, ce qui facilite le contrôle visuel.

FIABLE ET MOBILE GRÂCE À DES BATTERIES HAUTE PERFORMANCE VENTA SP 26 A

Flexibilité maximale : le VENTA SP 26 A (version BAT) doté d'une tension électrique de 100 à 240 volts s'utilise universellement pour le transport du patient en milieu hospitalier ainsi que dans les services de soins mobiles des patients et en voyage. Il dispose d'une connexion automobile de 12 volts sur sa face arrière qui assure une mobilité maximale. Le VENTA SP 26 A peut se raccorder, au besoin, via le câble pour allume-cigare du véhicule et être rechargé en cours de route.

Rapide et fiable : les batteries lithium ions de haute qualité du VENTA SP 26 A atteignent 90 pour cent de leur capacité de charge au bout de seulement deux heures et permettent l'utilisation constante d'un aspirateur de mucosités.

L'utilisation sur secteur demeure possible pendant l'opération de charge surveillée électroniquement, l'électronique de charge empêchant une surcharge des batteries. Une sécurité maximale est garantie via un signal sonore qui retentit en cas de faible charge de l'accu et une diode rouge brille simultanément.

Une technologie de pointe pour plus de puissance : les batteries haute performance du VENTA SP 26 A assurent un fonctionnement d'une durée exceptionnelle de l'aspirateur de mucosités d'env. 60 minutes en free flow et d'env. 90 minutes en high vac.

*Module de base du
VENTA SP 26 A*





Appareil complet VENTA 26 A



Affichage d'état par LED assurant une gestion détaillée de la capacité de charge



Douille de jonction automobile de 12 volts permettant de charger les accus en cours de route.

Facile à transporter : grâce à son faible poids, le VENTA SP 26 A est facile à transporter et convainc chaque utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VENTA SP 26 A	
Débit d'aspiration	26 l/min +/- 3 l
Vide	env -80 kPa
Tension	100-240 V AC
Fréquence	50/60 Hz
Consommation de courant maxi	1400 mA à 100 V / 50 Hz 600 mA à 240 V / 50 Hz
Puissance maxi absorbée	140 VA à 100 V / 50 Hz 144 VA à 240 V / 50 Hz
Mode de fonctionnement	fonctionnement continu
Type de batteries	2 batteries lithium ion de 2600 mAh
Durée de vie utile des accus	300 cycles de chargement et mde déchargement
Durée de fonctionnement sans fil	free flow: env. 60 min high vac: env. 90 min
Durée de charge	env. 2 heures (90 %) env. 3,5 heures (100 %)
Raccordement basse tension	12 - 13,8 V DC
Dimensions (l x h x p) en mm	275 x 275 x 160
Poids	4 kg
Volume du bocal à sécrétions	1,0 l
Classification conformément à l'annexe IX de la directive 93/42/CEE	II a

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR L'ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS KITS D'APPLICATION ET ACCESSOIRES



Un appareil compact qui sait tout faire : le support d'aspirateur VENTA permet un montage simple sur tous les rails porte-appareils disponibles sur le marché.

Optimise le flux de travail : les nouveaux aspirateurs de mucosités portables VENTA SP 26 N et VENTA SP 26 A sont polyvalents afin de satisfaire aux différentes et multiples exigences en milieu hospitalier ou en dehors. Le tout dernier chariot et le support d'aspirateur novateur ne sont que quelques exemples issus du programme d'accessoire qui vous enchantera par sa flexibilité maximale. Parallèlement aux kits d'accessoires préconfigurés donnés ici à titre d'exemple, il existe une multitude d'autres solutions à assortir au cas par cas en fonction des besoins.



Utilisable universellement : le support d'aspirateur VENTA peut également se fixer sur les tubes ronds horizontaux et verticaux.

Chariot robuste : un nouveau chariot extrêmement robuste, convainquant de par son plateau d'accueil fait sur mesure et ses quatre roulettes antistatiques (dont deux avec frein), a été développé spécifiquement pour VENTA SP 26.

Montage universel simple : un support d'aspirateur utilisable universellement a également été développé récemment. Les deux modèles du VENTA SP 26 se fixent sans problème à tous les rails porte-appareillage disponibles sur le marché, aussi bien sur les tubes horizontaux que les tubes verticaux (par ex. les porte-sérum, lits, fauteuils roulants).

Module de base du VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A :

l'appareil comprend un vacuomètre, un régulateur de vide, une interface mécanique pour le porte appareil et la poignée de transport, un tuyau de raccord à vide, un filtre hydrophobe antibactérien et antiviral et un cordon de branchement au secteur.

Dans un premier temps, le module de base VENTA SP 26 peut être utilisé comme aspirateur de mucosités grâce à l'association d'un kit d'application (KA) préconfiguré ou d'un kit d'application composé individuellement.

Appareil complet du VENTA SP 26 N ET VENTA SP 26 A :

outre l'équipement similaire à le module de base, la livraison comprend un bocal à sécrétions de 1 l en plastique (PSU) avec un porte-appareil, un couvercle de bocal à sécrétions en silicone avec trop-plein mécanique, un tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm d'une longueur de 1,3 m, un adaptateur de sortie vide vers le tuyau de raccord à vide et un bocal de rinçage.



Chariot VENTA SP



Couvercle de bocal à sécrétions en silicone à système de trop-plein intégré et bocal à sécrétions / bocal de rinçage / plastique (PSU) d'un litre avec porte-appareil



Support d'aspirateur universel VENTA



KA aspiration des sécrétions / portable / 1 l / PSU :

(Réf. 5752 5439)

- Bocal à sécrétions / bocal de rinçage / plastique (PSU) 1 l avec porte-appareil
- Couverture de bocal à sécrétions en silicone avec trop-plein intégré
- Adaptateur de sortie vide vers le tuyau de raccord à vide, d = 6-8 mm
- Tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm, longueur 1 mètre



KA aspiration des sécrétions / sur chariot / 1 l / PSU : (Réf. 5752 5447)

- Chariot VENTA SP
- Bocal à sécrétions / bocal de rinçage / plastique (PSU) 1 l avec porte-appareil
- Couverture de bocal à sécrétions en silicone avec trop-plein intégré
- Clip pour porte-appareil / métal
- Adaptateur de sortie vide pour tuyau de raccord à vide, d = 6-8 mm
- Tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm, longueur 1 mètre

KIT D'APPLICATION ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS RÉUTILISABLE / À USAGE UNIQUE

Réutilisable		
Dimension du bocal à sécrétions	portable	sur chariot
	Réf.	Réf.
1 l	5752 5439	5752 5447

À usage unique		Serres
Dimension du bocal à sécrétions	portable	sur chariot
	Réf.	Réf.
1 l	5752 4946	
2 l		5752 5449

Modèles	Réf.
Module de base VENTA SP 26 N	5752 5133
Appareil complet VENTA SP 26 N	5752 5129
Module de base VENTA SP 26 A	5752 5134
Appareil complet VENTA SP 26 A	5752 5130

Accessoires recommandés	Réf.
Filtre hydrophobe antibactérien et antiviral (à usage unique)	5750 0630

Consommables	Réf.
Tuyau de raccord à vide 6 x 12 mm, vendu au mètre	5750 5467
Tuyau de raccord à vide 8 x 14 mm, vendu au mètre	5750 5483
Raccord digital, stérile, non autoclavable, commande minimum lot de 10	000 0347 0

Autres accessoires	Réf.
Chariot pour VENTA SP	5752 5310
Support d'aspirateur VENTA universelle	5752 5311
Porte-cathéter pour chariot	5750 8002
Porte-cathéter petit modèle	5750 5157

Carquois pour cathéter	5752 5150
Cache pour carquois pour cathéter	5752 5151
Cuvette pour chariot, ronde	5752 4538
Panier de rangement	5750 8012
Clip pour porte-appareil / métal	5752 2048
Clip pour porte-appareil / plastique	5752 2540
Bocal à sécrétions / bocal de rinçage / plastique (PSU) 1 l avec porte-appareil	5752 5431
Couverture de bocal à sécrétions en silicone avec trop-plein intégré	5752 5432
Bocal externe Serres 2 l	5752 2044
Bocal externe Serres 1 l	5752 2537
Poche d'aspiration Serres 2 l à usage unique (lot de 24)	5752 4936
Poche d'aspiration Serres 1 l à usage unique (lot de 36)	5752 4937
Adaptateur de sortie vide vers le tuyau de raccord à vide, d = 68 mm	5752 2295



*Sur mesure :
VENTA SP 26 N avec
un chariot robuste
de conception récente*



■ Distributeur:

ATMOS MEDICAL France
3 Allée des Maraîchers
13013 MARSEILLE
France
Tél: +33 4 91 44 32 94
www.atmosmed.fr
www.atmos-medap.com

■ Fabricant:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch
Allemagne
Tél: +49 7653 689-0
www.atmosmed.com
www.atmos-medap.com