



MEDAP BORA UP 2080

Aspirateur universel pour le bloc, les services de soins intensifs et autres

MEDAP ■ ■ ■

BORA UP 2080

Pour un grand nombre d'utilisations médicales

La MEDAP BORA UP 2080 est un multitalent pour l'hôpital ou le cabinet médical. Elle répond aux différentes exigences au bloc et en soins intensifs. Cet aspirateur universel peu encombrant et maniable évacue rapidement et de manière fiable de grandes quantités de sang ou liquides séreux.

La MEDAP BORA UP 2080 peut être utilisée sur un trolley, une plateforme sur une unité d'alimentation plafond ou peut être fixée sur un rail standard.



Très grand confort regardant l'hygiène

GRÂCE À LA PROTECTION CONTRE LE DÉBORDEMENT ET LA CONTAMINATION

- Selon que le bocal à sécrétions (usage unique ou réutilisable) dispose ou non d'une protection contre la sur-aspiration, l'aspirateur peut être configuré avec une protection modulaire contre le débordement et la contamination
- Un filtre antibactérien performant situé à la sortie d'air représente une deuxième protection efficace contre les contaminations

Utilisation universelle

GRÂCE À DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

- Fixation possible sur un chariot, une plateforme d'unité d'alimentation plafond ou sur un rail standard
- Chariot avec sécurité anti-renversement, disposant de deux rails standards pouvant recevoir jusqu'à quatre bocaux à sécrétions
- Grande poignée pour faciliter le transport

Utilisation simple

GRÂCE À UN HAUT NIVEAU DE CONFORT

- Utilisation très simple grâce à une dépression réglable individuellement et un manomètre large bien visible
- Hauteur de travail optimale pour l'utilisateur
- Pédale pneumatique pour un mode stand-by économe en énergie

Grande flexibilité

GRÂCE À DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'INTÉGRATION

- Deux supports intégrés assurent une fixation simple et fiable au rail standard
- Large gamme d'accessoires permettant un choix individualisé pour une utilisation optimale
- Mise en place rapide et sûre de systèmes de recueil à usage unique ou réutilisables

Domaines d'utilisation :



Bloc opératoire / Anesthésie



Centre de chirurgie ambulatoire



Cabinet médical



Cabinet de chirurgie maxillo-faciale



Cabinet dentaire et de chirurgie maxillaire

SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT ATMOS

Protection anti-débordement ? Sécurité optimale

Pour répondre parfaitement aux exigences spécifiques à l'utilisation, les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP disposent d'un système de protection anti-débordement innovant et modulaire. Selon que le bocal à sécrétions (usage unique ou réutilisable) dispose ou non d'une protection contre la sur-aspiration, l'aspirateur peut être configuré avec une protection modulaire anti-débordement, en fonction des besoins individuels de l'utilisateur.

PROTECTION ANTI-DÉBORDEMENT UNIVERSELLE

La double protection anti-débordement avec un bocal de sécurité disposant d'un flotteur intégré et un filtre antibactérien et antiviral hydrophobe séparé (utilisation unique) est le bon choix pour une utilisation de courte durée, sans fonctionnement continu.

Réf : HM57524558



PROTECTION ANTI-DÉBORDEMENT CHIRURGIE

Cette double protection anti-débordement est équipée d'un filtre antibactérien et antiviral hydrophobe extrêmement performant dans le couvercle de la protection anti-débordement, et protège ainsi les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP quasi à 100%, assurant ainsi une très grande sécurité contre le débordement, notamment en utilisation continue.

Réf : HM57522546



FILTRE ANTIBACTÉRIEN SUPPLÉMENTAIRE

En plus de la protection anti-débordement, les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP disposent d'un filtre antibactérien performant situé à la sortie d'air, assurant ainsi une deuxième protection efficace contre les contaminations.

Réf : HM57505045



Très grand confort
regardant
l'hygiène



Équipement
de base

APPAREIL DE BASE

L'appareil de base n'est pas équipé de protection anti-débordement. Cette version est conseillée dans le cas d'utilisation de bocal à sécrétions à usage unique avec filtre antibactérien hydrophobe intégré. La tubulure de vide est alors connectée directement à l'embout de l'appareil. Pour protéger contre la pénétration de virus, il est conseillé d'utiliser un filtre antibactérien et antiviral supplémentaire.

Réf : HM57524514



ATMOS POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Aspirateur universel pour toutes les utilisations.

Pratiques, légers et flexibles, les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP s'intègrent parfaitement à l'environnement de travail - au bloc ainsi qu'en service de soins intensifs ou autres. Avec une capacité d'aspiration de 42 l/min (Freeflow) et d'une dépression allant jusqu'à -90 kPa, ils conviennent à un grand nombre d'utilisations dans le domaine de l'aspiration chirurgicale et des sécrétions. Compétence issue de la responsabilité pour le patient, le médecin et le personnel soignant.

Utilisation universelle



SETS D'APPLICATION

Avec le grand nombre de versions d'équipements et de sets d'application, il est possible de réagir de manière optimale aux différentes exigences avec les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP. Les deux aspirateurs peuvent ainsi être utilisés de manière individuelle – selon vos besoins.



PROTECTION ANTI-DÉBORDEMENT UNIVERSELLE (REF. HM57524558)

	Réf.
Protection anti-débordement mécanique avec fixation	HM57522391
Filtre antibactérien et antiviral hydrophobe	HM57524514
Tubulure d'aspiration 1 m, silicone, ø 6 mm	006.0009.0



PROECTION ANTI-DÉBORDEMENT CHIRURGIE (REF. HM57522546)

	Réf.
Protection anti-débordement mécanique avec fixation	HM57522392
Filtre antibactérien et antiviral hydrophobe	HM57521783
Tubulure d'aspiration 1 m, silicone, ø 6 mm	006.0009.0



ASPIRATION DES SÉCRÉTIONS

	Réf.
AS Aspiration des sécrétions / portable / 1 l / ATMOS	HM57525803
AS Aspiration des sécrétions / portable / 1 l	HM57523400
AS Aspiration des sécrétions / mobile / 2 l / ATMOS	HM57525805
AS Aspiration des sécrétions / mobile / 2 l / Serres	HM57525503
AS Aspiration des sécrétions / mobile / 3 l	HM57525498



ASPIRATION CHIRURGICALE

	Réf.
AS Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 3 l / ATMOS	HM57525807
AS Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 3 l / PSU	HM57525505
AS Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 4 l PC	HM57525668
AS Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 4 l / PSU	HM57525667

CONCEPT DE COMMANDES ATMOS

Utilisation ? Intuitive.

Les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP se caractérisent par leur facilité d'utilisation grâce à un grand nombre de caractéristiques importantes. Ils permettent d'aspirer rapidement, dans le silence et sur une longue durée de grandes quantités de sécrétions, sang et liquides séreux ainsi que les particules contenues dans ces produits

UTILISATION FACILE

Utilisation très simple grâce à une dépression réglable individuellement, un manomètre large bien visible et une hauteur de travail optimale pour l'utilisateur. La dépression est réglable de 0 à -90 kPa.



UTILISATION AU PIED

L'utilisateur peut allumer et éteindre la MEDAP BORA UP 2080 OP via la pédale pneumatique.



RAPIDEMENT PRÊTE À L'UTILISATION

La MEDAP BORA UP 2080 présente, sur ses côtés, deux interfaces mécaniques munies de couvercles évitant les salissures, pour recevoir des accessoires. Ceux-ci sont normés selon DIN EN ISO 19054 et permettent ainsi d'installer jusqu'à 2 systèmes de recueil de 1 l, à usage unique ou réutilisables et/ou la protection anti-débordement universelle ou chirurgicale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



MEDAP BORA UP 2080



MEDAP BORA UP 2080 OP

Aspiration	42 l/min
Dépression	-90 kPa auf NN
Tension	230 V AC
Alimentation spéciale	115 V AC
Fréquence	230 V AC: 50-60 Hz / 115 V AC: 60 Hz
Courant absorbé	230 V AC: 0,4 A / 115 V AC: 0,7 A
Puissance connectée	100 VA
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Fusibles	230 V AC: T 1,6 A H; 250 V / 115 V AC: 3,15 A H; 250 V
Dimensions (H x L x P)	310 x 360 x 310 mm (sans trolley) 1080 x 550 x 570 mm (avec trolley)
Poids	11 kg 21 kg (avec trolley)
Niveau sonore	50,5 dB (A)
Pédale	Non Oui (inclus dans la livraison)

VERSIONS

Des appareils complets sont disponibles, en complément des appareils de base.

	Art.-Nr.
BORA UP 2080 Appareil de base 230 V / 50 - 60 Hz	HM57522296
BORA UP 2080 OP Appareil de base 230 V / 50 - 60 Hz	HM57522301
BORA UP 2080 Appareil de base 115 V / 60 Hz	HM57522302
BORA UP 2080 OP Appareil de base 115 V / 60 Hz	HM57522303
BORA UP 2080 Appareil complet / Aspiration des sécrétions / portable / 1 x 1 l	HM57524856
BORA UP 2080 Appareil complet / Aspiration des sécrétions / mobile / 1 x 3 l	HM57525511
BORA UP 2080 OP Appareil complet / Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 4 l	HM57525512
BORA UP 2080 OP Appareil complet / Aspiration chirurgicale / mobile / 2 x 4 l / PC	HM57525673

ATMOS SYSTÈME MODULAIRE

Liberté d'équipement ? Bien entendu.

Un grand avantage des aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP est la grande liberté d'équipements proposés. Le système modulaire avec sa vaste gamme d'accessoires permet un choix individualisé pour une utilisation optimale au bloc et en services

ACCESSOIRES



Filtre	REF
Filtre antibactérien et antiviral hydrophobe pour protection anti-débordement	HM57521783
Filtre antibactérien et antiviral	HM57524514
Antiviral hydrophobe plat (100 pièces)	HM57505045
Filtre à fumées	HM57524928



Tubulures	REF
Tubulure, silicone, ø 6 mm, au mètre	006.0009.0
Tubulure de raccordement 8x14mm	HM57505483



Système de recueil à usage unique ATMOS	REF
Bocal extérieur ATMOS 1 l	401.0100.0
Bocal extérieur ATMOS 2 l	401.0200.0
Bocal extérieur ATMOS 3 l	401.0300.0
Poche d'aspiration ATMOS 1 l	401.0102.0
Poches d'aspiration ATMOS 1 l avec gélifiant	401.0101.0
Poche d'aspiration ATMOS 2	401.0202.0
Poches d'aspiration ATMOS 2 l avec gélifiant	401.0201.0
Poche d'aspiration ATMOS 3 l	401.0302.0
Poches d'aspiration ATMOS 3 l avec gélifiant	401.0301.0


D'autres systèmes de recueil à usage unique peuvent être utilisés avec les aspirateurs MEDAP BORA UP 2080 et MEDAP BORA UP 2080 OP.



MEDAP Webshop
Vous trouverez plus d'informations concernant nos produits et leur gamme d'accessoires dans notre Webshop.



Bocaux à sécrétions et couvercles	REF
Bocal à sécrétions 1 l PSU avec fixation	HM57525431
Couvercle	HM57525432
Verre à sécrétions 2,5 l	HM57505227
Couvercle	HM57505362
Bocal à sécrétions 3 l, PSU	HM57505297
Couvercle	HM57500390
Bocal à sécrétions 4 l PC avec fixation	HM57525658
Couvercle 4 l, PC	HM57525657
Bocal à sécrétions 4 l PSU avec fixation	HM57525656
Couvercle 4 l, PSU	HM57525655
Verre à sécrétions 5 l	HM57505228

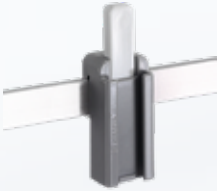

Fixations	REF
Pince (plastique)	HM57522540
Pince (métal)	HM57522048
Support pour bocal Receptal®, avec fixation	HM57525661



Protection anti-débordement	REF
Protection anti-débordement mécanique avec fixation	HM57522392
Protection anti-débordement mécanique avec fixation	HM57522391
Filtre antibactérien et antiviralhydrophobe	HM57524514



Autres accessoires	REF
Trolley pour BORA UP 2080	HM57525320
Prise de connexion double chirurgie 9/12 (chrome)	HM57500396
Prise de connexion double chirurgie 9/12 (plastique)	HM57520184
Sélecteur de bocaux	HM57522049
Réservoir à cathéters	HM57525150
Couvercle pour réservoir à cathéters	HM57525151



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Allemagne

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com



Pour accéder au site web
MEDAP BORA UP 2080,
scanner le QR code

