

ATMOS S 201 Thorax
mit Option Hybrid

Digitale Thoraxdrainage zur ERAS[®]-konformen Thoraxchirurgie

*Exactly
what
I need*



ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid

Wie geschaffen für das ERAS®-Konzept*. Und mehr.

Basierend auf klinischen Erkenntnissen empfiehlt die ERAS® Society in ihren aktuellen Guidelines, bei der Therapie von Thoraxpatienten den sog. „rest effect“ zu forcieren. Gemäß dem Motto „Less is more“ soll dabei auf Dauersog verzichtet werden und die Therapie durch konventionelle Formen wie bspw. die Schwerkraftdrainage ergänzt werden. Dadurch soll z. B. bei Patienten mit einer Lungenfistel der Selbstverschlussprozess gefördert und der Gesamtheilungsprozess deutlich beschleunigt werden.

Da die meisten Hersteller von Drainagesystemen jedoch entweder digitale oder konventionelle Lösungen anbieten, bedeutet ein Wechsel der Therapieform auch häufig einen Gerätewechsel. Nicht jedoch mit einem ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid: Dieses „2 in 1“-Universalgerät ermöglicht es dem Pflegepersonal, soggestützt zu drainieren und bei Bedarf die Option „Schwerkraftdrainage“ in Anspruch zu nehmen – in Sekundenschnelle, ganz ohne Gerätewechsel durch einfaches Ausschalten des ATMOS S 201 Thorax.

	Art.-Nr.
ATMOS S 201 Thorax	312.1000.0
Option Hybrid (ATMOS S 201 Thorax)	312.1090.0

Gerät eingeschaltet = aktive Drainage („suction“)
Gerät ausgeschaltet = Schwerkraftdrainage („no suction“)

* Was bedeutet das ERAS®-Konzept?

ERAS® ist die englische Abkürzung für „enhanced recovery after surgery“. Das bedeutet so viel wie „beschleunigte Genesung nach operativen Eingriffen“.

2 in 1
Universalgerät für
die differenzierte
Drainagetherapie



VIELE VORTEILE FÜR IHREN PRAXISALLTAG

- Freie Entscheidung der Therapieform - suction or no suction - ohne Einschränkungen
- Einfaches Handling mit einem Klick
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in der Thorax- und Kardiochirurgie mittels augmentiertem Weaning-Modus
- Ideale Lösung für die Einhaltung der aktuellen ERAS® Society Guideline in der Thoraxchirurgie

Zwei Therapieformen.



Mit einem Gerät.

WENIGER AUFWAND FÜR DAS PFLEGEPERSONAL

Der ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid überzeugt durch den integrierten „automatic weaning modus“ – ohne zusätzlichen Aufwand für das Pflegepersonal. Während der aktiven Drainage (d. h. der ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid ist eingeschaltet) überwacht das Gerät den vom Anwender eingestellten Soll-Unterdruck und passt durch die innovative Regelung die Aktivität der Pumpe an die Patientenbedürfnisse an.

Flexible Einsatz-
möglichkeit mittels
augmentiertem
Weaning-Modus

Schwerkraft-
drainage ohne
Sog

KLEINE BLASEN GROSSE WIRKUNG

Etwaige Luftleckagen werden beim ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid während der sogfreien Drainage über Blasen im Wasserschloss des Sekretbehälters sichtbar.



info



Um mehr über die ATMOS Thoraxdrainage zu erfahren, einfach QR-Code einscannen oder besuchen Sie unsere Website unter:

www.atmosmed.com



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com



Um zur ATMOS S 201 Thorax mit Option Hybrid Webseite zu gelangen, einfach QR-Code einscannen.