

Notice rapide ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride REF 312.1090.0

⚠ Avertissement

Évitez toute mauvaise utilisation !

Votre patient pourrait être gravement blessé.

Cette notice courte est valable uniquement pour l'appareil ATMOS S 201 Thorax avec l'option Hybride, avec bocal à sécrétions avec verrouillage hydraulique (REF 312.1150.5 et 312.1120.0).

L'appareil est reconnaissable au marquage suivant :



1. Pré-requis pour l'utilisation du bocal à sécrétions avec appareil éteint, pour un drainage passif passager

- ☑ Appareil ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride (312.1000.0 et 312.1090.0)
- ☑ Bocal à sécrétions avec verrouillage hydraulique (REF 312.1150.5 ou 312.1120.0)
- ☑ Verrouillage hydraulique rempli (50 ml)
- ☑ Effectuer un test d'étanchéité lors du démarrage de l'appareil est obligatoire !

2. Remplissage du verrouillage hydraulique

Remplir le verrouillage hydraulique à l'aide d'une seringue, d'une canule stérile taille 20 G et de 50 ml d'eau stérile.

⚠ Le remplissage du verrouillage hydraulique situé dans le bocal à sécrétions (appareil éteint) est obligatoire pour le drainage passif passager.



1. Avec la canule, vous pouvez percer le bouchon en silicone et remplir le verrouillage hydraulique

⚠ Utiliser uniquement un liquide pré-emballé, stérile pour remplir le verrouillage hydraulique.



2. Remplir le verrouillage hydraulique jusqu'à la marque indiquée (pas au-delà de la marque de 2 cm)

⚠ Assurez-vous avant de mettre en place le bocal sur l'appareil que le bouchon ferme le remplissage du verrouillage hydraulique.



3. Mettre à présent en place le bocal sur l'appareil

3. Test d'étanchéité

⚠ Pour pouvoir utiliser l'appareil, un test d'étanchéité réussi est obligatoire !



1. Connecter la tubulure à sécrétions du système de tubulures au bocal à sécrétions

2. Connecter le canal de mesure et de rinçage du système de tubulures au système

⚠ Ne pas visser trop fort les raccords Luer-Lock !



3. Connecter le raccord du système de tubulure au côté patient de la tubulure



⚠ Contrôler l'étanchéité du couvercle Luer-Lock du connecteur !



4. Fermer le connecteur



5. Allumer l'appareil

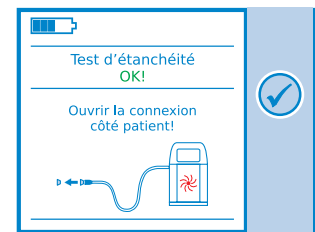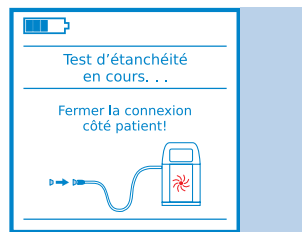

6. Ne continuer que si le test d'étanchéité est réussi !

ⓘ Contrôler l'étanchéité du couvercle Luer-Lock du connecteur !

ⓘ Ne poursuivre que juste avant de connecter le patient !

4. Passage du drainage actif au drainage passif par pesanteur

Arrêter la thérapie en touchant la commande . Éteindre l'appareil.

ⓘ La tubulure de mesure et de rinçage peut être laissée sur l'appareil. Pincer la tubulure de mesure et de rinçage n'est pas nécessaire d'un point de vue technique.

Placer l'appareil éteint avec le bocal à sécrétions dont le verrouillage hydraulique est rempli en-dessous du thorax, en position verticale pour un drainage passif de courte durée.

⚠ Veillez à ce que la tubulure patient ne présente pas de boucles ou de plis qui pourraient gêner le drainage de liquides ou d'air.

⚠ Le canal à sécrétions et le verrouillage hydraulique doivent être régulièrement contrôlés par un personnel médical spécialisé afin d'assurer un bon fonctionnement.

Appareil allumé = drainage actif
Appareil éteint = drainage par pesanteur
(Le verrouillage hydraulique doit être rempli !)