

Инструкция по эксплуатации

Кресло

МЕДИЦИНСКОЕ

ATMOS Chair Comfort

Русский



GA1RU.130210.0 2023-06
Версия: 2

Содержание

1	Наименование медицинского изделия	3
2	<u>Состав медицинского изделия</u>	<u>4</u>
3	<u>Назначение медицинского изделия</u>	<u>4</u>
3.1	<u>Назначение</u>	<u>4</u>
3.2	<u>Показания</u>	<u>4</u>
3.3	<u>Противопоказания</u>	<u>4</u>
3.4	<u>Возможные побочные действия</u>	<u>5</u>
3.5	<u>Способ применения</u>	<u>5</u>
3.6	<u>Условия применения</u>	<u>5</u>
3.7	<u>Меры предосторожности</u>	<u>5</u>
4	<u>Классификация медицинского изделия</u>	<u>6</u>
5	<u>Описание принципов работы</u>	<u>16</u>
5.1	<u>Обзор устройства</u>	<u>7</u>
5.2	<u>Подключение</u>	<u>7</u>
5.3	<u>Позиционирование пациента</u>	<u>8</u>
5.4	<u>Регулирование кресла</u>	<u>8</u>
5.4.1	<u>Регулирование подлокотников</u>	<u>8</u>
5.4.2	<u>Регулирование опоры для ног (версия sync)</u>	<u>9</u>
5.4.3	<u>Регулирование положения спинки</u>	<u>9</u>
5.4.4	<u>Регулирование подголовника</u>	<u>9</u>
5.4.5	<u>Регулирование высоты сиденья</u>	<u>10</u>
5.4.6	<u>Поворот кресла пациента</u>	<u>10</u>
5.5	<u>Придание антишокового положения</u>	<u>10</u>
5.6	<u>Устранение неисправностей</u>	<u>11</u>
6	<u>Техническое описание</u>	<u>12</u>
7	<u>Требования безопасности</u>	<u>13</u>
8	<u>Методы и средства очистки и дезинфекции</u>	<u>15</u>
8.1	<u>Очистка и дезинфекция поверхностей</u>	<u>15</u>
8.2	<u>Очистка и дезинфекция обивки</u>	<u>15</u>
8.3	<u>Рекомендуемые дезинфицирующие средства</u>	<u>16</u>
9	<u>Транспортировка</u>	<u>17</u>
10	<u>Упаковка</u>	<u>17</u>
11	<u>Маркировка</u>	<u>18</u>
12	<u>Хранение и срок годности</u>	<u>19</u>
13	<u>Утилизация</u>	<u>19</u>
14	<u>Гарантийные обязательства</u>	<u>20</u>
15	<u>Требования к техническому обслуживанию и ремонту</u>	<u>21</u>
15.1	<u>Периодические проверки</u>	<u>21</u>
15.2	<u>Проверка функциональности</u>	<u>21</u>
15.3	<u>Смазка подвижных частей</u>	<u>21</u>
15.4	<u>Отправка устройства</u>	<u>22</u>
16	<u>Рекламация</u>	<u>23</u>
17	<u>Официальное представительство на территории РФ</u>	<u>23</u>

1. Наименование медицинского изделия

Общее обычное наименование:	Кресло медицинское ATMOS Chair Comfort
Сокращенное название:	Кресло ATMOS Chair Comfort
Модели прибора, на которые распространяется данная техническая документация:	Кресло ATMOS Chair Comfort basic REF 535.5000.0 Кресло ATMOS Chair Comfort sync REF 535.5100.0

Класс потенциального риска применения медицинских изделий согласно ГОСТ 31508-2012:	1
---	---

Для упрощения номенклатуры в последующем описании в инструкции в основном будет использоваться термин «Кресло».

2. Состав медицинского изделия

Базовый модуль Кресла медицинского ATMOS Chair **Comfort** в исполнении

ATMOS Chair basic REF 535.5000.0

ATMOS Chair sync REF 535.5100.0

- 1 шт.

Инструкция по эксплуатации

-1 шт.

Принадлежности:

-подголовник.

– 1 шт.

3. Назначение

3.1. Назначение

- Кресло для осмотра и проведения лечебных процедур у пациентов в положении сидя или лежа
- В клиниках и частных практиках, корпоративные врачи и стоматологи (профилактика)
- В качестве подходящей и удобной поверхности для поддержки пациента во время лечения/осмотра.)
- Целевая аудитория: исключительно для персонала соответствующего отделения, который прошел необходимую обучение и подготовку, а именно, для врачей, ассистентов, медсестер, сиделок и т.д.
- Может возникнуть необходимость проведения установки и запуска техническим персоналом компании-производителя или персоналом уполномоченного специализированного дилера

3.2. Показания

- Проведение диагностических осмотров и лечебных процедур

3.3. Противопоказания

- Использование в качестве рабочего кресла
- Использование в качестве операционного кресла/стола
- Использование в качестве кровати

3.4. Возможные побочные действия

- При использовании по назначению побочных действий не выявлено

3.5. Способ применения

- Пациент принимает удобное положение на кресле, врач проводит корректировку положения пациента с помощью ручной регулировки и приступает к осмотру или лечебным мероприятиям

3.6. Условия применения

- Эксплуатация только квалифицированным медперсоналом, прошедшим соответствующее обучение
- Место применения- в медицинских учреждениях/ЛПУ

3.7. Методы предосторожности при применении

- Не применять в непосредственной близости от высокочастотных хирургических аппаратов или дефибрилляторов
- В зонах, в которых вероятно присутствие горючих или взрывоопасных газов либо паров (например, анестетики)

4. Классификация медицинского изделия

Классификация согласно Приложению IX Директивы ЕС 93/42/ЕЕС	Класс 1
Маркировка CE	CE
Код медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией	139100

5.Общее описание принципов работы


Кресло медицинское ATMOS Chair Comfort в основе своего принципа работы принцип гидравлического рычага. В поршнях залита несжимаемая жидкость, которая, подчиняясь действию физических законов позволяет создавать значительные усилия, не прилагая при этом огромную силу. Кресло ATMOS можно использовать для нужд каждого пациента в отдельности. Высота сиденья может регулироваться с помощью гидравлического рычага. Высота и угол наклона подголовника регулируются вручную. Спинку сиденья можно регулировать вручную до полностью горизонтального положения. Верхняя часть стула может вращаться, а форму подлокотников можно отрегулировать под индивидуальные нужды.

Версии

	ATMOS Chair Comfort basic	ATMOS Chair Comfort sync
Регулируемая с помощью гидравлического механизма высота подъема сиденья	x	x
Регулируемая вручную спинка сиденья	x	x
Синхронизированная регулировка поддержки для ног		x


5.1 Обзор устройства

Вид спереди

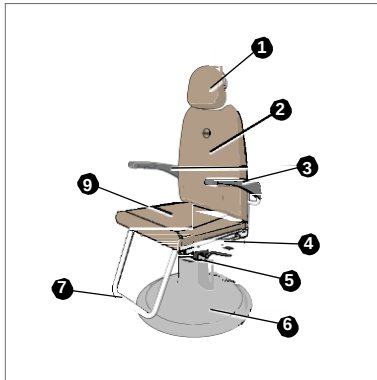

ATMOS Chair Comfort basic


- ① Подголовник
- ② Спинка
- ③ Подлокотник
- ④ Рычаг регулировки спинки*

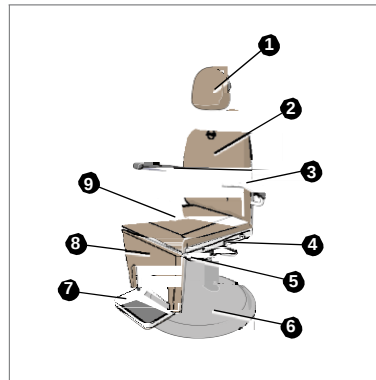

ATMOS Chair Comfort sync

- ⑤ Подключение уравнивающего соединения
- ⑥ Основание
- ⑦ Подставка для ног
- ⑧ Поддержка для ног (версия Sync)
- ⑨ Поверхность сиденья

Вид сзади

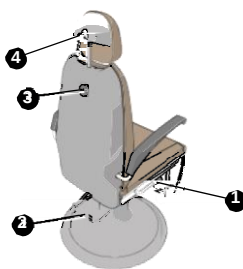

- ① Рычаг регулировки спинки
- ② Рычаг регулировки высоты сиденья
- ③ Фиксирующий винт подголовника (высота)
- ④ Фиксирующий винт подголовника (угол)


5.2 Подключение устройства

1. Перед первым использованием очистите и дезинфицируйте изделие.
2. Выполните проверку работоспособности, см. главу 15.1 «Проверка работоспособности» на стр.21.

**Использование рычага для транспортировки кресла категорически запрещается и приводит к не гарантийному повреждению кресла.*

5.3 Позиционирование пациента

- Следите за тем, чтобы пациент сидел посередине кресла. Пациенту не разрешается сидеть на подлокотнике, спинке или опоре для ног. Не позволяйте пациентам вставать на опору для ног.

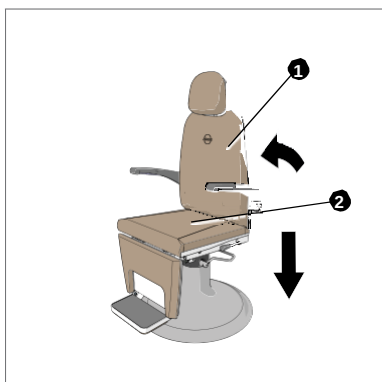

⚠ Риск опрокидывания кресла в связи с избыточной нагрузкой на одну сторону

1. Сдвиньте спинку ❶ в вертикальное положение.
2. Переведите кресло ❷ в нижнее положение.
3. До проведения данных процедур не позволяйте пациенту садиться или вставать.


5.4 Регулирование высоты сиденья

⚠ ОСТОРОЖНО!

Риск травмы подвижными частями устройства

Существует риск повреждения пальцев пациента.

- Во время регулировки кресла пациента руки пациента должны всегда лежать на подлокотниках.

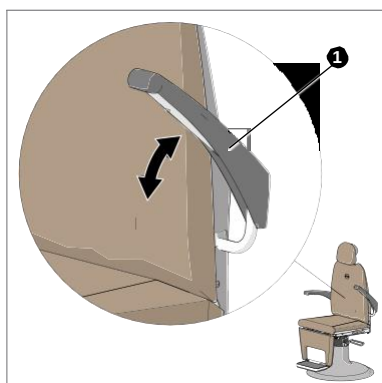

5.4.1 Регулирование подлокотников

Поднятие подлокотников


1. Поднимите подлокотник, ❶ соблюдая осторожность.

Опускание подлокотников

ⓘ Подлокотники могут сломаться, если дать им опуститься под собственным весом.

1. Опустите подлокотник, ❶ соблюдая осторожность.

5.4.2 Регулирование опоры для ног (версия ATMOS Chair Comfort sync)

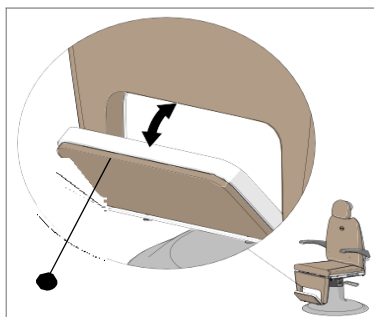

Раскладывание опоры для ног

1. Потяните за рукоятку и разложите опору для ног движением книзу.

Складывание опоры для ног


1. Сложите опору для ног движением кверху.

5.4.3 Регулирование положения спинки



1. Потяните рычаг регулировки спинки ❶ вниз, одновременно оттягивая или надавливая на спинку.
2. Отпустите рычаг регулировки спинки ❶, как только опора для спинки примет необходимое положение.
» Спинка зафиксирована.


5.4.4 Регулирование подголовника

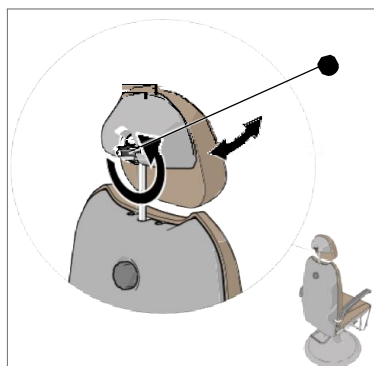

Угол


1. Отсоедините фиксирующий винт подголовника (угол) ❶ и переставьте подголовник в необходимое положение.
2. Затяните фиксирующий винт подголовника (угол) ❶.
» Подголовник зафиксирован под необходимым углом..

Высота

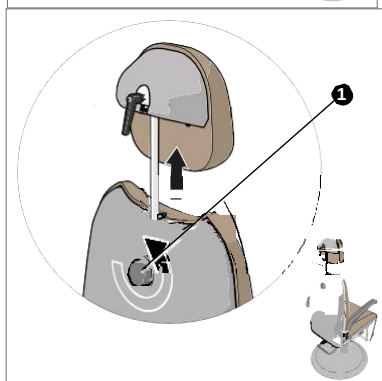

1. Отсоедините фиксирующий винт подголовника (высота) ❶ и переставьте подголовник в необходимое положение.
2. Затяните фиксирующий винт подголовника (высота) ❶.
» Подголовник зафиксирован на необходимой высоте.

5.4.5 Регулирование высоты сиденья

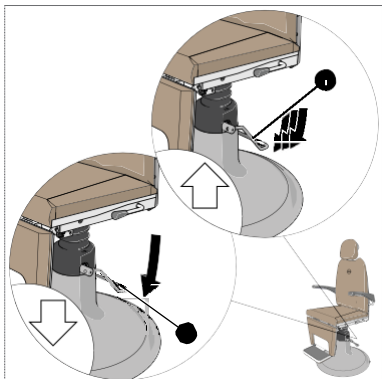


Поднятие

1. Поднимите рычаг насоса ❶ для регулирования высоты подъёма сиденья.

Опускание

1. Опустите рычаг насоса ❶ до максимума.

5.4.6 Поворот кресла пациента

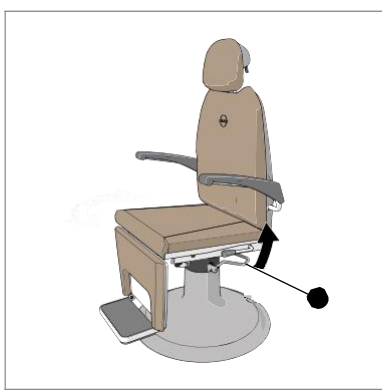

1. Поверните верхнюю часть кресла.
2. Для фиксации кресла поднимите рычаг ❶ ногой.

5.5 Придание противошокового положения



1. Опустите спинку сиденья до полностью горизонтального положения

5.6 Устранение неисправностей

Изделие было подвергнуто тщательным заводским испытаниям контроля качества. Если, несмотря на все предпринятые меры, обнаружится неисправность, необходимо связаться с партнером компании ATMOS по обслуживанию.

6 Технические характеристики

Высота подъема сиденья	56 см (мягкая обивка сиденья)
Макс. грузоподъемность	150 кг (допустимая рабочая нагрузка)
Высота спинки	600 мм (без подголовника) 780 мм (подголовник в нижнем положении)
Возможность поворота	360 °
Наклон спинки	От +7° до –90°
Условия окружающей среды при транспортировке/хранении	
• Температура	От –10 до + 50 °C
• Влажность воздуха без конденсации	20...95%
• Атмосферное давление	от 700 до 1060 гПа
Условия окружающей среды при эксплуатации	
• Температура	От +10 до +35 °C
• Влажность воздуха без конденсации	20...95%
• Атмосферное давление	от 700 до 1060 гПа
Максимальная высота над уровнем моря при эксплуатации	≤ 2000 m
Размеры (ДхШхВ)	
• Версия Basic	820 x 670 x 1280 мм
• Версия Sync	700 x 670 x 1280 мм
Вес	
• Версия Basic	63 кг
• Версия Sync	59 кг
Периодические проверки	Рекомендуется: проводить проверки каждые 24 месяца.
Классификация согласно приложению IX к Директиве ЕС 93/42/ЕЕС	Класс 1 В соответствии с Положениями 1 и 12, Раздел 3
Маркировка CE	CE

Технические характеристики по состоянию на ноябрь 2018 г.

7 Требования безопасности

Общая информация по технике безопасности

Никогда не оставляйте пожилых пациентов, детей, пациентов с травмами, инвалидов и пр. пациентов, нуждающихся в помощи, в кресле пациента без присмотра.

Декларация соответствия считается недействительной, если клиент или третья сторона внесли изменения в продукт. Изменения включают, но не ограничиваются: любыми модификациями, использованием принадлежностей, произведенных третьей стороной, а также удалением предупреждающих и информационных знаков.

В случае отсутствия на Вашем изделии или нечеткости любых знаков следует связаться с ATMOS и заменить необходимый знак.

Опасность для пользователей, пациентов и третьих лиц

Поражение электрическим током вследствие неправильного питания, неправильного обращения с продуктом или повреждения компонентов продукта.

- Не очищайте изделие в моечной установке и не используйте аппарат высокого давления.
- Следите за тем, чтобы в изделие не попала жидкость. При попадании жидкости в устройство эксплуатацию устройства необходимо прекратить. В подобном случае изделие следует очистить и дезинфицировать, после чего переслать в компанию ATMOS для ремонта.
- Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные части, полученные от компании ATMOS.
- Соблюдайте требования спецификаций относительно периодических проверок, изложенные в главе 15.1 «Периодические проверки» на стр.21.
- Сборка, внесение новых настроек и изменений, добавление блоков и ремонт могут выполняться только специалистами, которых допустила до этих работ компания ATMOS.
- Запрещается модификация устройства без разрешения производителя.

Устройство должно всегда находиться в полностью исправном состоянии.

Неисправность устройства может привести к травме пользователя или пациента.

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие повреждений. Если вы заметили повреждение, не используйте устройство.
- Проверяйте работоспособность устройства не менее одного раза в неделю, а также в любое другое время при наличии подозрений, связанных с безопасностью устройства.
- Соблюдайте требования спецификаций относительно периодических проверок, изложенные в главе 15.1 «Периодические проверки» на стр.21.
- Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные части, полученные от компании ATMOS.
 - Сборка, внесение новых настроек и изменений, добавление блоков и ремонт могут выполняться только специалистами, которых допустила до этих работ компания ATMOS.

Риск опрокидывания кресла в связи с избыточной нагрузкой на одну сторону.

Кресло пациента может опрокинуться, травмировав Вас или Вашего пациента.

- Следите за тем, чтобы пациент сидел посередине кресла. Пациенту не разрешается сидеть на подлокотнике, спинке или опоре для ног.
- Сдвиньте кресло в нижнее положение, а спинку — в верхнее положение до того, как пациент сядет в него или встанет.

Риск инфекции от биологических жидкостей на устройстве!

Существует риск передачи инфекционных заболеваний.

- Очистку и дезинфекцию изделия необходимо выполнять после каждого использования.
- Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Опасность взрыва и пожара!

Существует риск ожогов и повреждений.

- Запрещается эксплуатировать изделие в местах, где существует потенциально взрывоопасная атмосфера, или в атмосфере с повышенным содержанием кислорода.
- Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные части, полученные от компании ATMOS.

Только полностью исправное изделие соответствует требованиям техники безопасности для пользователей, пациентов и третьих лиц. Поэтому необходимо тщательно соблюдать следующие инструкции.

Повреждение, вызванное при перекачивании кресла и нарушение предполагаемого использования.

Существует риск повреждения кресла и кабеля питания.

- Не перевозите грузы или людей на кресле пациента.
- Не перекачивайте кресло пациента через кабель питания.

Риск повреждения вследствие избыточной нагрузки.

Существует риск повреждения опоры для ног.

- Не позволяйте пациентам вставать на опору для ног.

8 Методы очистки и дезинфекции

Мы рекомендуем документировать все работы по техническому обслуживанию и замене запасных частей в письменном виде.

Пользователь несет ответственность за достижение и поддержание требуемых результатов очистки и дезинфекции. Как правило, требуется валидация и регулярное отслеживание выполнения этих процедур.

ОСТОРОЖНО!

Риск инфекции от биологических жидкостей на устройстве и его принадлежностях.

Существует риск передачи инфекционных заболеваний.

- В ходе выполнения процедур чистки всегда надевайте одноразовые перчатки.
- Выполняйте чистку оборудования после каждого использования.
- Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

8.1 Очистка и дезинфекция поверхностей

Выполняйте чистку оборудования после каждого использования. Если поверхность кресла испачкалась при попадании на нее секрета или других веществ, необходимо проводить дезинфекцию не менее одного раза в сутки.

1. Переведите кресло в нижнее положение.
2. Смочите чистую не оставляющую волокон ткань мыльным раствором комнатной температуры или чистящим средством для пластика.
3. Протрите все поверхности влажной тканью.
4. Дезинфицируйте поверхности с помощью чистой не оставляющей волокон ткани и рекомендуемого дезинфицирующего средства.
5. Перед повторным использованием дайте изделию высохнуть.

8.2 Очистка и дезинфекция обивки

Необходимо незамедлительно удалять масло, жир и жидкость с обивочного материала. Выполняйте чистку кресла пациента после каждого использования. Если поверхность кресла испачкалась при попадании на нее секрета или других веществ, необходимо проводить дезинфекцию не менее одного раза в сутки.

1. Переведите кресло в нижнее положение.
2. Используйте теплую мягкую мыльную воду.
3. Очистите обивку с помощью влажной тряпки из микрофибры или мягкой щетки.
4. Дезинфицируйте обивку с помощью чистой не оставляющей волокон ткани и рекомендуемого дезинфицирующего средства. Не оставляйте дезинфицирующее средство на поверхности дольше, чем предписано.

8.3 Рекомендуемые дезинфицирующие средства

ВНИМАНИЕ

Неподходящие очищающие и дезинфицирующие средства

Риск повреждения поверхности изделия, коррозии и образования стрессовых трещин.

- **Не** используйте очищающие или дезинфицирующие вещества, содержащие следующие ингредиенты:
- Раздражающие вещества
- Вещества, которые могут повредить пластик, компоненты из стали или растворить смазочные вещества.

ВНИМАНИЕ

Неподходящие очищающие и дезинфицирующие средства

Существует риск повреждения обивки.

- **Не** используйте очищающие или дезинфицирующие вещества, содержащие следующие ингредиенты, для очистки обивки:
 - Растворители или хлориды
 - Политуру или воск
 - Химические очистители
 - Масла, жиры или спирт
- Используйте очищающие вещества с величиной pH 6-8.
- Соблюдайте требования производителя в отношении концентрации и времени вымачивания.

Используйте подходящее дезинфицирующее средство для поверхностей.

9 Транспортировка

Условия окружающей среды при транспортировке/хранении • Температура • Влажность воздуха без конденсации • Атмосферное давление	От –10 до + 50 °C 20...95% от 700 до 1060 гПа
Условия окружающей среды при эксплуатации • Температура • Влажность воздуха без конденсации • Атмосферное давление	От +10 до +35 °C 20...95% от 700 до 1060 гПа

10 Упаковка

Упаковка: картон.

Кресло пациента покрыто плёнкой, внутри упакован в картонную заводскую коробку подголовник.



11 Маркировка

Этикетка

	 Greiner GmbH Wettstrasse 1 D-74385 Pleidelsheim	
REF	6612085 HYD,MAN,KO,FU 535.5000.0 ATMOS Chair Comfort basic	
	2000-00-00 For: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG	
V in:	V ~, Hz I in: max. A IP	
OP:		
	 150kg	Polster / Cushion:
UDI:		Q-Control:
SN		
	20194539700050001	

Проект маркировки для России:

	 Greiner GmbH Wettstrasse 1 D-74385 Pleidelsheim	
REF	6612085 HYD,MAN,KO,FU 535.5000.0 ATMOS Chair Comfort basic	
	2000-00-00 For: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG	
V in:	V ~, Hz I in: max. A IP	
OP:		
	   150kg	Polster / Cushion:
UDI:		Q-Control:
SN		
	20194539700050001	

Описание значков и символов, имеющиеся на изделии и на паспортной табличке изделия:

	Соблюдайте указания из инструкции по эксплуатации (синий цвет).
	Предупреждение; при наблюдении проявлять особую осторожность
	Настоящее изделие удовлетворяет соответствующим требованиям директивы ЕС.
	Производитель.
	Дата производства.
SN	Серийный номер.
REF	Номер заказа.

	Только для использования в помещениях
	Требует профессиональной утилизации.
	Максимальная нагрузка
	Не перевозите грузы или людей на кресле (версии Mobile/Complete).

12 Хранение и срок годности

Условия окружающей среды при транспортировке/хранении • Температура • Влажность воздуха без конденсации • Атмосферное давление	От –10 до + 50 °C От 20 до 95% От 700 до 1060 гПа
--	---

13 Утилизация

Упаковка

1. Утилизируйте упаковку изделия для дальнейшей переработки. **Кресло**

ATMOS Chair Comfort

Утилизация изделия совместно с бытовыми отходами запрещена. Продукт содержит техническое масло. Утилизация технического масла



должна осуществляться профессионально. Не позволяйте техническому маслу проникнуть в почву или воду.

1. Очистите и дезинфицируйте устройство.
2. В Германии: Перешлите изделие в компанию ATMOS или специализированному поставщику. Они смогут профессионально утилизировать изделие.
3. В других странах: Утилизируйте устройство профессиональным образом и в соответствии с нормативными и правовыми актами страны утилизации. Корпус состоит из полностью перерабатываемых материалов. Соблюдайте нормативные и правовые акты конкретной страны.

Гидравлический блок и газовая пружина

Если Вы не можете вернуть изделие в компанию ATMOS или специализированному поставщику для утилизации, соблюдайте следующие инструкции.

ОСТОРОЖНО!

Риск повреждения и разрушения вследствие высокого внутреннего давления на газовые пружины и внезапного движения поршневых стержней

Существует риск повреждения глаз, лица и рук.

- Наденьте соответствующее защитное оборудование.
 - Закройте люк.
 - Следует с особой осторожностью работать с пусковым механизмом после удаления газовых пружин.
1. Сбросьте давление в газовой пружине. Всегда следуйте спецификациям производителя газовой пружины. Производитель указан на паспортной табличке.
 2. Удалите масло, используемое для смазывания газовой пружины.
 3. Удалите масло из гидравлического блока.
 4. Грамотно и профессионально утилизируйте масло.
 5. Утилизируйте гидравлический блок и газовую пружину для дальнейшей переработки.

14 Гарантийные обязательства

Срок эксплуатации кресел пациента ATMOS Chair Comfort составляет не менее 5-ти лет. Компания ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG дает 1 год гарантии на кресла ATMOS Comfort. Эта гарантия начинается с даты приёмки изделия пользователем, согласно документам, если в контракте на доставку не предписано иное.

Несмотря на любые альтернативные условия гарантии, которые могли быть указаны в

договоре купли-продажи, условия гарантии, указанные здесь, исключают и заменяют все другие устные или письменные договорённости и гарантии. Указанные здесь условия гарантии распространяются исключительно на неисправные кресла. ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG ни в коем случае не будет нести ответственность за случайные или косвенные убытки (включая упущенную выгоду), телесные повреждения, ущерб или непредвиденные расходы, прямо или косвенно возникшие в результате использования всей моделей кресла пациента ATMOS Chair Comfort.

15 Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Техническое обслуживание, ремонт и периодические проверки могут производиться исключительно специалистами, обладающими соответствующими техническими познаниями и знакомыми с изделием. Для выполнения таких процедур необходимы оригинальные запасные части и специальное испытательное оборудование.

Компания ATMOS рекомендует: Работы должны выполняться уполномоченным партнером ATMOS по обслуживанию. Это является гарантией выполнения ремонта и испытаний на профессиональном уровне с использованием оригинальных запасных частей и сохранением гарантийных обязательств.

15.1 Периодические проверки

Просьба следовать специфическим для вашей страны руководствам касательно регулярных проверок.

ATMOS рекомендует проводить проверки каждые 24 месяца.

15.2 Проверка работоспособности

Проверяйте работоспособность устройства не менее одного раза в неделю, а также в любое другое время при наличии подозрений, связанных с безопасностью устройства.

1. Проверьте кресло на предмет повреждений.
2. Переведите кресло в нижнее положение, обращая внимание на любые необычные шумы.
3. Убедитесь в том, что все подвижные части могут быть без проблем отрегулированы:
 - Спинка
 - Подлокотник
 - Подголовник
 - Подставка для ног
4. Проверьте, легко ли поворачивается кресло.

15.3 Смазка подвижных частей

Чтобы кресло полностью функционировало, необходимо смазывать подвижные части с регулярными интервалами.

1. Удалите грязь с подвижных частей.
2. Увлажните оси и сочленения с помощью коммерчески доступного масла или жира.
3. Проверьте, хорошо ли закреплены все фиксирующие винты.

15.4 Отправка изделия

1. Выполните чистку и дезинфекцию изделия и принадлежностей в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
2. Приложите использованные принадлежности к изделию.
3. Заполните форму QD 434 «Запрос на доставку/возвратная поставка», а также соответствующий **Акт деконтаминации**.

☞ Форма прилагается к каждому из изделий и доступна на веб-сайте www.atmosmed.com.

4. Изделие должно быть обернуто мягким материалом и упаковано в надлежащую упаковку.
5. Заполните форму QD 434 «Запрос на доставку/возвратная поставка», а также соответствующий **Акт деконтаминации**, который находится в конверте.
6. Прикрепите конверт снаружи посылки.
7. Перешлите изделие в ATMOS или местному поставщику.

16 Рекламация

Жалобы в отношении работы изделия можно отправить производителю ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG (АТМОС МедицинТехник ГмбХ & Ко. КГ, Германия) по следующему адресу:

Адрес: Людвиг-Кегель-Штрассе 16, 79853, Ленцкирх,
Германия (Ludwig-Kegel-Straße 16, 79853 Lenzkirch,
Факс: Germany) 0049 7653-689-190
E-mail: info@atmosmed.de
Телефон: 0049 7653 689 0

17 Официальное представительство на территории Российской Федерации

ООО «АТМОС Медикаль»

Адрес: 105005, Россия, Москва, переулок Посланников, 5, корп.
E-mail: 8.atmosmed@atmosmed.ru
Веб-сайт: www.atmos-med.ru
Телефон: 8-800-707-08-94 (бесплатный по России)



ООО «АТМОС Медикаль»,
105005, Россия, Москва, переулок
Посланников, 5, корп. 8,
Москва/Россия
Тел.: 8-800-707-08-94 (бесплатный по
России)
atmosmed@atmosmed.ru